



apteka
w sieci

PINK Super czuły test ciążowy, płytkowy x 1 szt.

Cena: 9,90 zł



Opis słownikowy

Producent	HYDREX
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Test ciążowy

Opakowanie

- 1 test oraz środek pochłaniający wilgoć
- 1 pipetka
- instrukcja używania wyrobu

Opis

Szybki i wysoce czuły test ciążowy służący do wykrywania ludzkiego gonadotropiny kosmówkowej (hCG) - hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży. Wykonanie badania testem jest bardzo proste i polega na wprowadzeniu do okienka na płytce testowej 3 kropli moczu. Wynik w postaci barwnych prążków, które pojawiają się w okienku wynikowym na płytce testowej, uzyskuje się w czasie 1-5 minut.

Sposób użycia

Przed wykonaniem badania należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją dołączoną do testu.

- Pobrać mocz do pipetki



- Wprowadzić 3 krople moczu na płytkę
- Odczekać 1-5 minut i odczytać wynik

Interpretacja wyników

Wynik ujemny (brak ciąży)

Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie ma ciąży.

Wynik dodatni (ciąża)

Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T nie ma znaczenia, może być taka sama, słabsza lub silniejsza niż intensywność barwy prążka C. Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jest się w ciąży.

Wynik nieważny

W przypadku, gdy pojawia się żaden prążek lub pojawi się tylko prążek testowy T, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu ciążowego i ściśle przestrzegając instrukcji używania wyrobu.