



# PINK Super czuły test ciążowy, strumieniowy x 1 szt.

Cena: 9,90 zł



## Opis słownikowy

Producent	HYDREX
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Test ciążowy

### Opakowanie

- 1 test strumieniowy
- 1 instrukcja wykonywania testu

### Opis


Szybki i wysoce czuły test ciążowy służący do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) - hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Dokładność testu odpowiada badaniu laboratoryjnemu w ponad 99%. Przyrząd jest prosty w użyciu, a wynik ujawnia w zaledwie 1 minutę.

### Sposób użycia

Przed wykonaniem badania należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją dołączonej do testu.

Zdjąć nasadkę i skierować końcówkę testu pod strumień moczu na co najmniej 10 sekund. Można mocz również zebrać do suchego i czystego naczynia i zanurzyć w nim na co najmniej 10 sekund samą końcówkę testu.

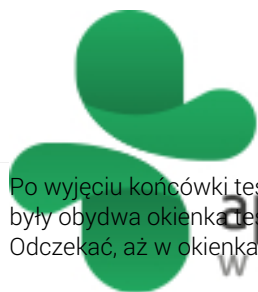

Po wyjęciu końcówki testu z badanego moczu nałożyć z powrotem nasadkę i umieścić test na poziomej powierzchni tak, aby widoczne były obydwa okienka testu. Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekać, aż w okienkach pojawią się barwne prążki.

Wynik testu odczytać po czasie 1 do 4 minut od momentu zanurzenia końcówki testu w moczu. Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę.

Nie należy brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

#### **Ostrzeżenia**

Test służy wyłącznie do użytku zewnętrznego. Test należy przechowywać w temperaturze 2-30°C. Nie zamrażać. Przed wykonaniem badania doprowadzić test w opakowaniu do temperatury pokojowej. Nie używać testu po dacie ważności umieszczonej na opakowaniu. Nie używać testu w przypadkach, gdy kopertka foliowa jest uszkodzona, ponieważ wilgoć z powietrza może uszkodzić test. Test jest przeznaczony do jednorazowego użycia. Zużyty test usuwać jak każdy inny odpad domowy. Test przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.