



Plaster chłodzący KRIO Plaster x 1 szt.



Cena: 2,90 zł

Opis słownikowy

Producent MILAPHARM

Opis produktu

Postać

Plaster (rozmiar 12 x 18cm)

Opakowanie

1 szt.

Działanie

Plaster **KRIO Plaster** zawiera wykazujący chłodzące działanie mentol, który zmniejsza obrzęk pourazowy oraz pomaga koić bóle stawowo-mięśniowe m.in. pleców, barków i karku. Plaster pozostaje dyskretny pod ubraniem i nie brudzi go.

Wskazania

Łagodzenie bólu stanowo-mięśniowego barków, pleców i karku oraz zmniejszenie obrzęku pourazowego.

Sposób użycia

Odciąć fragment plastra o wielkości dopasowanej do powierzchni i umiejscowienia bólu. Zerwać folię ochronną. Kojącą stronę plastra nałożyć na umytą i osuszoną skórę. Plaster można pozostawić na skórze przez maksymalnie 12 godzin.

Ostrzeżenia

KRIO Plaster to wyrób medyczny nieinwazyjny stosowany na powierzchnię skóry. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Należy stosować



zgodnie z instrukcją. Stosowanie podczas ciąży i karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Nie stosować bezpośrednio na rany ani podrażnioną lub uszkodzoną skórę.

Unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. W razie kontaktu z oczami natychmiast przemyć wodą. Po zastosowaniu dokładnie umyć ręce. Nie potykać. W razie poknięcia skontaktować się natychmiast z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Jeżeli pojawi się zaczerwienienie, należy przerwać używanie i skonsultować się z lekarzem. Osoby, które nie mogą samodzielnie usunąć plastra nie powinny stosować produktu bez nadzoru.

Skład

Rubber adhesive (Rubber, Super Ester, Silicone Dioxide Lanolin), Menthol iCamphor, Wintergreen Oil.