



apteka
w sieci

Plastry na odciski x 8 szt. PASOCARE

Apteka "Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Cena: 8,46 zł



Opis słownikowy

Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Plastry (rozmiar: 20 x 72mm)

Opakowanie

8 szt.

Opis

Plastry **PASOMED** posiadają centralnie umieszczony krążek z kwasu salicylowego. Wykazują działanie wygładzające i ochronnie, zmiękczają skórę, dzięki czemu wspomagają szybkie i bezbolesne pozbycie się odcisku. Dodatkowo, okrąg z pianki polietylenowej chroni zagrożony obszar skóry przed tarciem i uciskiem.

Sposób użycia

- Przed nałożeniem plastra dokładnie oczyścić i osuszyć skórę w okolicach odcisku, aby zapewnić dobrą przyczepność i skuteczność działania.
- Wyjąć plaster z opakowania bezpośredniego.
- Zdjąć warstwę ochronną i umieścić plaster na skórze, kierując centralny obszar bezpośrednio na odcisk.
- Plaster zmieniać codziennie.



Stosować kurację nie dłużej niż przez 2 tygodnie, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Ostrzeżenia

Wyrób medyczny niejałowy, przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, jednorazowego, w celu leczenia odcisków. Nie stosować na: uszkodzoną, podrażnioną, zaczerwienioną lub popękaną skórę. W przypadku wystąpienia uczulenia lub podrażnienia należy natychmiast zaprzestać stosowania.

W przypadku: diabetyków, osób z zaburzeniami krążenia, kobiety w ciąży - przed użyciem produktu należy skonsultować się z lekarzem. Plastry zawierają 35-40% kwasu salicylowego.