



Plastyry na pęcherze, na piętę x 6 szt. PASOCARE

Cena: 14,77 zł



Opis słownikowy

Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Plastyry

Opakowanie

6 szt. (rozmiar 6,9 x 4,4cm)

Opis

Hydrokoloidowe plastry na pęcherze przynoszą ulgę i pomagają chronić zmienione chorobowo miejsce przed otarciami i podrażnieniami. Plastry są wygodne w aplikacji i dyskretne. Doskonale dopasowują się do kształtu ciała i pokrywają pęcherze, tworząc optymalne środowisko do szybkiego gojenia.

Wskazania

Pęcherze na piętach lub innych częściach ciała.

Sposób użycia

- Skórę umyć i osuszyć przed zastosowaniem.
- Chwyć niesklejone krawędzie plastra i usunąć biały papier zabezpieczający.
- Trzymając niesklejoną krawędź zabezpieczoną folią ze strzałkami, przykleić plaster tak, aby hydrokoloid pokrywał pęcherz.



- Usunąć z plastra folię oznaczoną strzałkami i docisnąć krawędzie.

apteka
w sieci