



# Plastry okulistyczne OPTI-PLAST 82 mm x 57 mm x 10 szt. MEDYCZNE VISCOPLAST



Cena: 23,33 zł

## Opis słownikowy

Producent	3M
Rejestracja	Opatrunek

## Opis produktu

### Postać

Plaster okulistyczny

### Opakowanie

10 plastrów, 82 x 57 mm

### Działanie

Plastry pomagają przy korekcyj wzroku. Są hipoalergiczne, wykonane z przepuszczalnego materiału, który pozwala oddychać skórze.

### Wskazania

Okolice oczodołów, korekta wady wzroku

### Sposób użycia

Umyć i osuszyć skórę wokół oka. W przypadku suchej skóry zaleca się posmarować okolice oka kremem nawilżającym, który się wchłania. Dopiero wtedy, po odczekaniu 30-60 minut, zastosować plaster

- Usunąć zabezpieczający papier z plastra. Lekko przymknąć oko, nie napinając mięśni. Nie zaciskać oka.



• Przyłożyć opatrunek centralnie na oko, węższą stroną do nosa i rozpocząć przyklejanie od strony nosa w kierunku brwi. Nie naciągać plastra ani skóry wokół oka.

• Po umieszczeniu plastra lekko docisnąć palcem część przylepną wokół oka.

Plaster usuwać delikatnie, przy powierzchni skóry w kierunku ucha. Niepoprawne, zbyt gwałtowne usuwanie plastra może grozić podrażnieniem lub zaczerwienieniem.

#### **Ostrzeżenia**

Podczas stosowania produktu należy przestrzegać zaleceń lekarza okulisty, w przypadku wystąpienia reakcji skórnych trzeba natychmiast przerwać stosowanie produktu. U pacjentów z wrażliwą skórą zaleca się stosowanie plastra z klejem silikonowym. Nie jest zalecane ponowne używanie produktu, gdyż nie zachowuje on wtedy deklarowanych właściwości i nie osiąga zamierzonego działania.