

Podkolanówki uciskowe CLASSIC CCL 2 PANI TERESA

Cena: 99,00 zł



Opis słownikowy

Producent	SIGVARIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Podkolanówki uciskowe (II klasa kompresji)

Opakowanie

1 para

Opis


Medyczne wyroby uciskowe zapewniają starannie kontrolowany ucisk, który poprawia przepływ krwi w dolnych kończynach i zwiększa przepływ chłonki, poprawiając jednocześnie zaopatrzenie tkanek i mikrokrążenie. Stosowanie kompresji pomaga m.in. redukować obrzęki, wspomaga gojenie ran (owrzodzenia podudzia) i łagodzi dolegliwości w przypadku żylaków i uwarunkowanych żylnie zmian skórnych.

Wskazania

Wyroby medyczne PANI TERESA CLASSIC CCL 2 stosowane są w terapii kompresyjnej dolnych kończyn. Produkty przeznaczone są do długotrwałego leczenia, jak również do uciskania i zwięzania średnicy żył.

Dopasowanie wyrobu:

W celu właściwego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodów miejsca wskazanego w tabeli, po czym dobrać wymiar rozmiar.

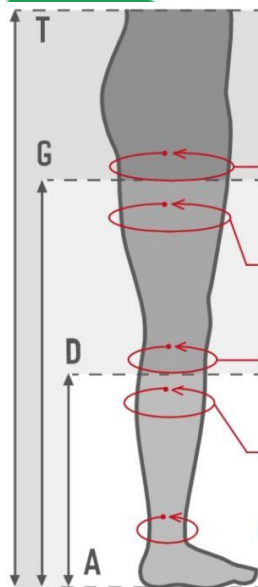

Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
cG	Obwód uda (około 5 cm poniżej kroku)	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
cF	Obwód w połowie uda (połowa odległości pomiędzy rzepką i krokien)	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
cD	Obwód pod kolaniem (w odległości 2 palców poniżej kolana)	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
cC	Obwód w najszerszym miejscu łydki	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
cB	Obwód powyżej kostki, w najwęższym miejscu	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

	Pomiar	Krótkie	Długie
RAJSTOPY, POŃCZOCHY	A-G	60-70 cm	71-83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34-37 cm	38-44 cm

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania bezwzględne:

Ciężkie zwapnienia tętnic (zaawansowana niedrożność tętnic obwodowych). Nagromadzenie wody i duszności, występujące już w stanie spoczynku (niewyrównana niewydolność serca). Zapalenie żył wywołane mikroorganizmami (septyczne zapalenie żył). Szczególnie ciężka postać zakrzepicy żył (bolesny obrzęk siniczny).

Względne przeciwwskazania:

Sączące choroby skóry (dermatozy). Nietolerancja materiału, z którego jest wykonany wyrób. Zaburzenia czucia w obrębie kończyn wskutek uszkodzonych lub zniszczonych nerwów (zaawansowana neuroterapia obwodowa). Choroba zapalna stawów, reumatoidalne zapalenie stawów. Zaburzenia krążenia krwi w tętnicach. Obrzęk limfatyczny lub obrzęk lipidowy w stadium 2 lub wyższym.

Ostrzeżenia

Stosowanie wyrobów medycznych pończosznicych o działaniu uściskowym należy skonsultować ze specjalistą.

Parametry

Długość	długie, krótkie
Kolor	jasny beż, beż, ciemny beż, czarny, grafit
Palce	palce otwarte, palce zamknięte
Rozmiar	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL



Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67