



Pompka ssąca miniaturowa ASPIVENIN

Cena: 69,87 zł



Opis słownikowy

Producent	AUVEX
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Pompka ssąca

Opakowanie

Podręczny pojemnik z pompką ssącą, końcówki, ulotka z instrukcją

Działanie

Pompka ssąca **ASPIVENIN** wytwarza próżnię na powierzchni skóry natychmiastowo i bezboleśnie usuwając jad z ukąszonego miejsca. Jego zastosowanie umożliwia oczekiwanie na interwencję medyczną, konieczną w poważnych przypadkach (np. reakcja alergiczna). Natychmiastowe działanie pompki przynosi ulgę, niweluje nieprzyjemne uczucie swędzenia, ból i zmniejsza ryzyko nieprzyjemnych reakcji.


Wskazania

Do natychmiastowego zastosowania w przypadku ukąszeń:

- **Insektów** (os, pszczoł, much końskich, szerszeni)
- **Pajęczaków** (pająków, kleszczy, skorpionów)
- **Ryb** (skorpen, ostroszy)
- **Większości węży**
- **Roślin parzących**

Sposób użycia

- Dobrać końcówkę, która najbardziej odpowiada rodzajowi ukąszenia i delikatnie przymocować ją do urządzenia. Całkowicie wysunąć tłok.
- Przyłożyć pompkę do zranionego miejsca, trzymając ją jedną ręką.

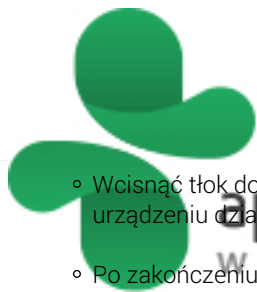

- Wcisnąć tłok do oporu nie zwalniając nacisku kciuka przed zatrzymaniem się tłoka. Nastąpi przyssanie się pompki. Pozwolić urządzeniu działać przez 20 sekund do 3 minut (w zależności od ukąszenia). Proces może być bezpiecznie powtórzony.
- Po zakończeniu, unieść tłok końcem kciuka i przemyć ranę środkiem odkażającym.

Zalecany czas procesu usuwania jadu

- 20-30 sekund : Ugryzienia much, komarów
- 1-3 minuty : Ukąszenia os, pszczoł, szerszeni
- 1-2 minuty : Skorpiony, pająki
- 2-3 minuty : Ostrosze, meduzy, węże, szkaradnice

Zapoznaj się z ulotką w celu uzyskania dokładnych informacji

Uwagi/Ostrzeżenia

Aspivenin nie wystarczy w poważnych przypadkach ukąszeń (reakcjach alergicznych), konieczna jest pomoc medyczna!

Nie stosować na powiekach, zewnętrznych narządach płciowych, czyścić tylko końcówki