




apteka  
w sieci

# Pończochy Pani TERESY II klasa kompresji, rozmiar M, zamknięte, długie, kolor czarny, 1 para

Cena: 85,80 zł

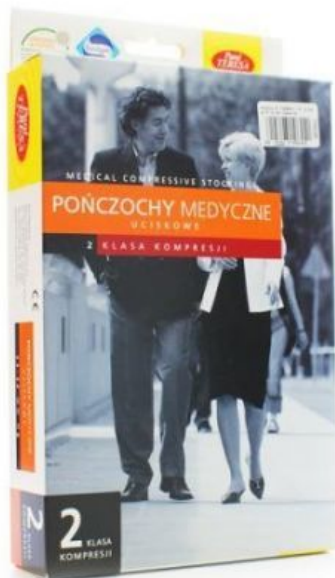

## Opis słownikowy

Producent      Pani Teresa

## Opis produktu

### Postać

Pończochy przeciwżylakowe

### Opakowanie

1 para (2 szt), Kolor-czarny, Rozmiar M. Palce zamknięte. Długość długość nogi do pachwiny powyżej 71 cm


### Działanie

Drugi stopień kompresji stosuje się w celach leczniczych. Wskazaniem do stosowania medycznych pończoch uciskowych 2 klasy kompresji są żylaki z towarzyszącymi obrzękami i bólami kończyn. Aby prawidłowo dobrać rozmiar należy zmierzyć obwody nóg (lewej oraz prawej). Pomiaru należy dokonać rano, po nocnym odpoczynku.

### Wskazania

Pończochy przeciwżylakowe 2 stopień kompresji polecane są w przypadku;

- żylaki z towarzyszącymi obrzękami
- zakrzepy żył powierzchniowych i głębokich
- po przebyłym zakrzepowym zapaleniu żył (przy obrzękach i bólach)
- przed - i pooperacyjna profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył
- obrzęki po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach

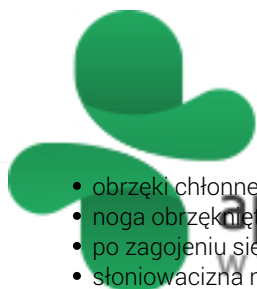

- obrzęki chłonne
- noga obrzęk nieta, bolesna, „ciężka”
- po zagojeniu się niewielkich owrzodzeń żyłakowych
- słoniowacizna nóg i łydki
- obrzęki nóg i powiększające się żyłaki u kobiet ciężarnych

#### Sposób stosowania

Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Nałożyć do pełnej długości. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić. Aby prawidłowo dobrać rozmiar należy zmierzyć obwody nóg (lewej oraz prawej) w miejscach wskazanych w tabeli rozmiarów. Pomiaru należy dokonać rano, po nocnym odpoczynku.

#### Przeciwwskazania:

Miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Buergera, tzw. stopa cukrzycowa.