

Pończochy Pani Teresy okołoperacyjne, L 1 para

Cena: 51,14 zł

Opis słownikowy

Producent Pani Teresa

Opis produktu

Postać

Pończochy okołoperacyjne

Opakowanie

1 para (2 szt), Kolor-biały, Rozmiar L. Palce otwarte.

Działanie

Są obok farmakoterapii bardzo skuteczną ochroną przed zakrzepicą żył, na którą są narażeni pacjenci unieruchomieni w wyniku różnego rodzaju operacji chirurgicznych. Pończochy te mogą być stosowane nawet podczas długoterminowej terapii. Pończochy okołoperacyjne dostępne w wersji z czubkiem otwartym (wolne palce), w kolorze białym. (13 mmHg – 18 mm Hg) Rozmiar: L obwód górnej części uda 57 - 63 cm środek uda 53 - 56 cm obwód uda pod kolanem 35 - 38 cm obwód łydki 36 - 39 cm obwód nad kostką 23 - 25 cm.

Wskazania

Stosowane w profilaktyce przeciwzakrzepowej u chorych przed, w trakcie i po zabiegu operacyjnym. Stosować ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza specjalisty

Sposób stosowania

Żeby nie podrażniać skóry usunąć delikatnie – przed użytkowaniem wyrobu – wszywkę z oznaczeniem rozmiaru – od strony wewnętrznej. Wszywkę usunąć ostrożnie palcami, żeby nie uszkodzić wyrobu (bez użycia ostrych narzędzi np. nożyczek). Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Nałożyć do pełnej długości. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

Przeciwwskazania:

Miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Buergera, tzw. stopa cukrzycowa.