



apteka
w sieci

Protefix krem mocujący do protez 20ml (24g)

Cena: 10,91 zł

Opis słownikowy

Producent QUEISSER



www.aptekawsieci.pl

Opis produktu

Postać:

Krem mocujący

Opakowanie:

Tubka 20 ml (24g)

Skład:

100 g zawiera: sole Na i Ca kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego 30 g, karobksymetylocelulozę 23 g, parafinę, wazelinę, dwutlenek krzemu, mentol, azorubinę, metylparaben.

Działanie:

Zapewnia wygodne mocowanie protezom pełnym i częściowym.

- Pewnie mocuje protezę i pozwala na spożywanie takich pokarmów, na jakie ma się ochotę.
- Uniemożliwia przedostawanie się resztek jedzenia pomiędzy protezę a szczękę, zapobiegając tym samym powstawaniu stanów zapalnych
- Zapewnia długotrwałe uczucie świeżości.

Odnacza się dużą siłą mocowania przez cały dzień, zarówno w warunkach utrudnionej przyczepności jak i przy intensywnej produkcji śliny. Działa na mokro! W odróżnieniu od większości podobnych produktów, wyjątkowa kompozycja 2 polimerów pozwala na wiązanie wody i natychmiastowe działanie bez osuszania protezy. Ma neutralny smak i łatwo daje się usuwać z protezy.



- nie wymaga osuszania protezy po jej myciu (krem nanosi się bezpośrednio na umytą protezę),
- duża siła mocowania przez cały dzień,
- skuteczność i bezpieczeństwo,
- skuteczność działania i jakość produktu potwierdzona w badaniach niezależnych Instytutów Konsumenckich w Niemczech.

Wskazania:

Do protez zębowych.

Sposób użycia:

Nałożyć w odstępach na czystą i wilgotną protezę (patrz rysunek). Krem nakładać oszczędnie, gdyż przy nadmiernej ilości maleje skuteczność działania kremu a ponadto zbyt grubą warstwę kremu jest trudniej usuwać z protezy i podniebienia. Protezę założyć i przycisnąć przez kilka sekund do podniebienia i dziąseł. Nie jeść przez następne 5 minut.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu.