

Protefix krem mocujący do protez, ekstra mocny XXL 94g

Cena: 25,50 zł

Opis słownikowy

Producent	QUEISSER
Rejestracja	Wyrób medyczny inny



Opis produktu

Postać

Klej do protez

Opakowanie

2 tuby po 47g (1+1 za połowę ceny)

Skład

Mieszanina soli Na i Ca kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, metylparaben.

Działanie

5 x EFEKT

- 1. Silniejsze działanie: przedłużone mocowanie do 16 godzin
- 2. Szybki efekt: działa natychmiastowo - nawet na wilgotnej protezie
- 3. Skuteczne uszczelnienie protezy przed drobinkami jedzenia
- 4. Ochrona przed uciskiem protezy

Dawkowanie

Protefix krem mocujący nałożyć w odstępach na czystą i wilgotną protezę. Krem nakładać oszczędnie, gdyż przy nadmiernej ilości maleje skuteczność działania kremu a ponadto zbyt grubą warstwę kremu jest trudniej usuwać z protezy i podniebienia. Protezę założyć



apteka
w sieci

i przycisnąć przez kilka sekund do podniebienia i dziąseł. Nie jeść przez następne 5 minut.

Opis

Krem mocujący Protefix jest bardzo skuteczny w przypadku większości problemów z mocowaniem protezy. Odznacza się dużą siłą mocowania przez cały dzień, zarówno w warunkach utrudnionej przyczepności jak i przy intensywnej produkcji śliny. Działa na mokro. Kompozycja 2 polimerów pozwala na wiązanie wody i natychmiastowe działanie bez osuszania protezy. Ma neutralny smak i łatwo daje się usuwać z protezy.

Charakterystyka:

- nie wymaga osuszania protezy po jej myciu (krem nanosi się bezpośrednio na umytą protezę),
- duża siła mocowania przez cały dzień,
- skuteczność i bezpieczeństwo,
- skuteczność działania i jakość produktu potwierdzona w badaniach niezależnych Instytutów Konsumenckich w Niemczech.

Działania niepożądane:

Niektóre osoby mogą być wrażliwe na pojedyncze składniki kremu.