




apteka  
w sieci

# Rajstopy Pani TERESY II klasa ucisku, rozmiar S, długie beżowe 1 para

Cena: 83,99 zł

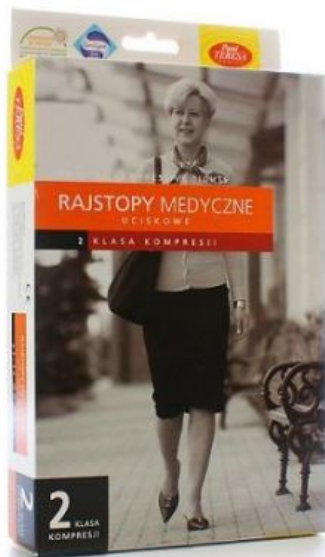

## Opis słownikowy

Producent: Pani Teresa

## Opis produktu

### Postać

Rajstopy przeciwżylakowe

### Opakowanie

1 para , Kolor-beżowy, Rozmiar S


### Działanie

Drugi stopień kompresji stosuje się w celach leczniczych. Wskazaniem do stosowania medycznych rajstóp uciskowych 2 klasy kompresji są żylaki z towarzyszącymi obrzękami i bólami kończyn. Aby prawidłowo dobrać rozmiar należy zmierzyć obwody nóg (lewej oraz prawej). Pomiaru należy dokonać rano, po nocnym odpoczynku. Rozmiar L Obwód górnej części uda: 52- 74 cm Obwód na środku uda: 49-62 cm Obwód pod kolanem: 36 -43 cm Obwód łydki w największym obwodzie: 37-45 cm Obwód kostki mierzony w punkcie najmniejszego obwodu: 25-27 cm. Wybór długości rajstóp.

- krótkie -długość od górnej części uda w dół do 70cm oraz wielkość obuwia 34 - 38
- długie - długość od górnej części uda w dół od 71cm wzwyż oraz wielkość obuwia 38 - 43

### Wskazania

Rajstopy przeciwżylakowe 2 stopień kompresji polecane są w przypadku;

- 
- żylaki z towarzyszącymi obrzękami
  - zakrzepy żył powierzchniowych i głębokich
  - po przebyłym zakrzepowym zapaleniu żył (przy obrzękach i bólach)
  - przed- i pooperacyjna profilaktyka zakrzepowego zapalenia żył
  - obrzęki po stłuczeniach, złamaniach i zwichnięciach
  - obrzęki chłonne
  - noga obrzęknięta, bolesna, „ciężka”
  - po zagojeniu się niewielkich owrzodzeń żylakowych
  - słoniowacizna nóg i goleni
  - obrzęki nóg i powiększające się żylaki u kobiet ciężarnych

#### Sposób stosowania

Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie. Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty. Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia. Nałożyć do pełnej długości. Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.

#### Przeciwwskazania:

Miażdżyca tętnic kończyn dolnych, choroba Buergera, tzw. stopa cukrzycowa.