



# Rajstopy uciskowe CLASSIC CCL 1 PANI TERESA



Cena: 63,46 zł

## Opis słownikowy

Producent	SIGVARIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Rajstopy uciskowe (I klasa kompresji)

### Opakowanie

1 para

### Opis


Medyczne wyroby uciskowe zapewniają starannie kontrolowany ucisk, który poprawia przepływ krwi w dolnych kończynach i zwiększa przepływ chłonnki, poprawiając jednocześnie zaopatrzenie tkanek i mikrokrążenie. Stosowanie kompresji pomaga m.in. redukować obrzęki, wspomaga gojenie ran (owrzodzenia podudzia) i łagodzi dolegliwości w przypadku żylaków i uwarunkowanych żylnie zmian skórnych.

### Wskazania

Wyroby medyczne **PANI TERESA CLASSIC CCL 1** stosowane są w terapii kompresyjnej dolnych kończyn. Produkty przeznaczone są do długotrwałego leczenia, jak również do uciskania i zwięzania średnicy żył.

### Dopasowanie wyrobu:

W celu właściwego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodów miejsca wskazanego w tabeli, po czym dobrać wymiar rozmiar.

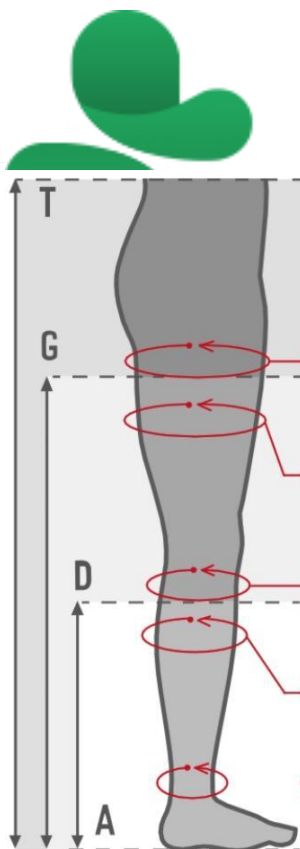

Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)	S	M	L	XL
cG	Obwód uda (około 5 cm poniżej kroku)	43-58	52-70	52-74	64-80
cF	Obwód w połowie uda (połowa odległości pomiędzy rzepką i krokiem)	40-52	46-61	49-62	56-69
cD	Obwód pod kolaniem (w odległości 2 palców poniżej kolana)	27-34	32-40	36-43	40-49
cC	Obwód w najszerszym miejscu łydki	29-35	34-41	37-45	42-48
cB	Obwód powyżej kostki, w najwęższym miejscu	19-21	22-24	25-27	28-31

	Pomiar	Krótkie	Długie
<b>RAJSTOPY, POŃCZOCHY</b>	A-G	60-70 cm	71-83 cm
<b>PODKOLANÓWKI</b>	A-D	34-37 cm	38-44 cm

## Przeciwwskazania

### Przeciwwskazania bezwzględne:

Ciężkie zwapnienia tętnic (zaawansowana niedrożność tętnic obwodowych). Nagromadzenie wody i duszności, występujące już w stanie spoczynku (niewyrównana niewydolność serca). Zapalenie żył wywołane mikroorganizmami (septyczne zapalenie żył). Szczególnie ciężka postać zakrzepicy żył (bolesny obrzęk siniczny).

### Względne przeciwwskazania:

Sączące choroby skóry (dermatozy). Nietolerancja materiału, z którego jest wykonany wyrób. Zaburzenia czucia w obrębie kończyn wskutek uszkodzonych lub zniszczonych nerwów (zaawansowana neuroterapia obwodowa). Choroba zapalna stawów, reumatoidalne zapalenie stawów. Zaburzenia krążenia krwi w tętnicach. Obrzęk limfatyczny lub obrzęk lipidowy w stadium 2 lub wyższym.

## Ostrzeżenia

Stosowanie wyrobów medycznych pończoszniczych o działaniu uściskowym należy skonsultować ze specjalistą.



Długość	długie, krótkie
Kolor	jasny beż, beż, ciemny beż, czarny, grafit
Palce	palce otwarte, palce zamknięte
Rozmiar	S, M, L, XL