



Rajstopy uciskowe CLASSIC CCL 2 PANI TERESA



Cena: 100,07 zł

Opis słownikowy

Producent	SIGVARIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Rajstopy uciskowe (II klasa kompresji)

Opakowanie

1 para

Opis


Medyczne wyroby uciskowe zapewniają starannie kontrolowany ucisk, który poprawia przepływ krwi w dolnych kończynach i zwiększa przepływ chłonnki, poprawiając jednocześnie zaopatrzenie tkanek i mikrokrążenie. Stosowanie kompresji pomaga m.in. redukować obrzęki, wspomaga gojenie ran (owrzodzenia podudzia) i łagodzi dolegliwości w przypadku żylaków i uwarunkowanych żylnie zmian skórnych.

Wskazania

Wyroby medyczne PANI TERESA CLASSIC CCL 2 stosowane są w terapii kompresyjnej dolnych kończyn. Produkty przeznaczone są do długotrwałego leczenia, jak również do uciskania i zwięzania średnicy żył.

Dopasowanie wyrobu:

W celu właściwego dopasowania rozmiaru należy dokonać pomiaru obwodów miejsca wskazanego w tabeli, po czym dobrać wymiar rozmiar.

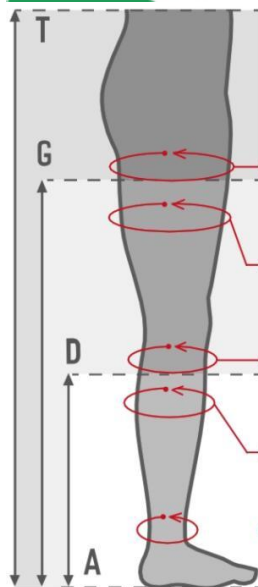

Miejsce pomiaru	Pomiar (cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
cG	Obwód uda (około 5 cm poniżej kroku)	43-51	50-53	53-58	57-63	62-69	63-72	64-78
cF	Obwód w połowie uda (połowa odległości pomiędzy rzepką i krokien)	39-46	44-49	49-54	53-56	56-65	64-70	67-75
cD	Obwód pod kolaniem (w odległości 2 palców poniżej kolana)	28-31	30-33	32-36	35-38	37-41	39-44	43-47
cC	Obwód w najszerszym miejscu łydki	29-32	31-34	33-37	36-39	38-43	40-45	44-49
cB	Obwód powyżej kostki, w najwęższym miejscu	18-20	20-21	21-23	23-25	25-27	27-30	30-32

	Pomiar	Krótkie	Długie
RAJSTOPY, POŃCZOCHY	A-G	60-70 cm	71-83 cm
PODKOLANÓWKI	A-D	34-37 cm	38-44 cm

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania bezwzględne:

Ciężkie zwapnienia tętnic (zaawansowana niedrożność tętnic obwodowych). Nagromadzenie wody i duszności, występujące już w stanie spoczynku (niewyrównana niewydolność serca). Zapalenie żył wywołane mikroorganizmami (septyczne zapalenie żył). Szczególnie ciężka postać zakrzepicy żył (bolesny obrzęk siniczny).

Względne przeciwwskazania:

Sączące choroby skóry (dermatozy). Nietolerancja materiału, z którego jest wykonany wyrób. Zaburzenia czucia w obrębie kończyn wskutek uszkodzonych lub zniszczonych nerwów (zaawansowana neuroterapia obwodowa). Choroba zapalna stawów, reumatoidalne zapalenie stawów. Zaburzenia krążenia krwi w tętnicach. Obrzęk limfatyczny lub obrzęk lipidowy w stadium 2 lub wyższym.

Ostrzeżenia

Stosowanie wyrobów medycznych pończosznicych o działaniu uściskowym należy skonsultować ze specjalistą.

Parametry

Długość	długie, krótkie
Kolor	jasny beż, beż, ciemny beż, czarny, grafit
Rozmiar	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL