



Remo-Wax Krople 10ml + gumowa gruszka



Cena: 17,87 zł

Opis słownikowy

Producent	ORION PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Krople

Opakowanie

Pojemnik 10ml + gumowa gruszka

Działanie

Krople **Remo-Wax** skutecznie usuwają zanieczyszczenia i woskowinę. Produkt zawiera bezpieczne dla zdrowia nieinwazyjne składniki pochodzenia naturalnego, przygotowane według specjalnie dobranej formułacji.

Wskazania

Higiena zewnętrznego kanału słuchowego.

Sposób użycia

Zawartość butelki ogrzać do temperatury ciała (około 37 °C) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.

Przechylić głowę w kierunku barku lub położyć się z głową zwróconą na bok i podać do ucha od 10 do 20 kropli. Pociągając delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Można wprowadzić do ucha mały tampon z bawełny zwilżony kilkoma kroplami Remo-Wax.

Pozostawić preparat w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby można pozostawić roztwór w uchu na noc. Po użyciu kropli do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax przewód słuchowy musi zostać przepłukany. W celu przepłukania uszu można użyć gruszki gumowej lub udać się do lekarza lub pielęgniarki.

Płukanie ucha przy użyciu gumowej gruszki

- Gruszkę należy umyć i przepłukać przed każdym użyciem.
- Nabrać do gruszki wody o temperaturze ciała.
- Wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do kanału słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płukać ucho, delikatnie i bez pośpiechu ściskając gruszkę.

Nie należy wprowadzać końcówki gruszki w głąb przewodu słuchowego.

- Powtórzyć płukanie kilka razy, aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta.
- Po zakończonym zabiegu gruszkę należy umyć i wycisnąć do pusta w celu usunięcia zawartości. Należy pozostawić gruszkę, kierując końcówkę gruszki do dołu, tak aby znajdująca się w niej woda mogła wypłynąć.

Ostrzeżenia

Produktu nie należy stosować w przypadku:

- stanu zapalnego lub bólu ucha,
- wydzieliny z ucha,
- uszkodzonej, przedziurawionej lub przebitej błony bębenkowej (np. dren po nakłuciu błony bębenkowej),
- uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników kropli.

Jeśli nie udało się rozpuścić korka woskowinowego, podawanie kropli i płukanie uszu można powtarzać przez kolejne trzy dni. Stosując **Remo-Wax** regularnie raz w miesiącu można uniknąć ponownego powstawania korka woskowinowego.

Skład

Alantoina, lanolina etoksylogowana, polisorbata 80, polisorbata 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy, eter polioksyetyleno-oleilowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z tłuszczu norek, alkohol fenyletylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetonowy, woda.