



SALVEQUICK MED Blister Reque plastry na pęcherze x 5 szt.

Cena: 13,50 zł



Opis słownikowy

Producent	ORKLA CARE
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Plastry

Opakowanie


5 x 42mm x 72mm

Opis

Plastry chronią powierzchnię skóry w miejscu pęcherzy i przynoszą ulgę w ucisku. Nowy innowacyjny wzór z hydrożelowymi opatrunkami dobrze utrzymuje się na miejscu, jednocześnie jest bezbolesny do usunięcia.

Sposób użycia

- Oczyszczyć i osuszyć skórę przed użyciem plastra.
- Rozerwij ochronną torebkę z plastrem i usuń papier ochronny z plastra.
- Przyłóż plaster pośrodku pęcherza.
- Usuń górną warstwę ochronną z tworzywa sztucznego.

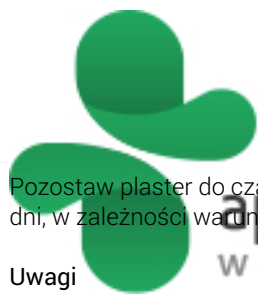

Pozostaw plaster do czasu, aż sam się odklei, jednak nie dłużej niż pięć dni. Plaster na pęcherze może pozostać na skórze przez kilka dni, w zależności warunków stosowania.

Uwagi

osoby z zaburzeniami gojenia się ran, np. diabetycy oraz osoby starsze, powinny regularnie sprawdzać stan gojącego się pęcherza. Nie używać na pęcherze wypełnione krwią, pęcherze głębokie, silnie krwawiące lub zakażone.