



SIGVARIS pończochy TROMBO 1 para

Cena: 100,38 zł

Opis słownikowy

Producent SIGVARIS

Opis produktu

Postać

Pończochy przeciwzakrzepowe

Opakowanie

1 op 2 szt

Działanie

Zakrzepica może wystąpić po wszystkich operacjach chirurgicznych, a także u osób długo przebywających w łóżku. Ryzyko wystąpienia choroby zwiększa się z wiekiem, a także na przykład po urazach oraz w przypadku zaburzeń krążenia krwi. Pończochy Trumbo charakteryzują się następującymi zaletami;

- Wyroby bez szwu o zmiennym stopniu ucisku, w kostce 18 mmHg i proporcjonalnie zmniejszająca się kompresja ku górze
- odporne na maści i tłuszcze, ponieważ wykonane są z włókna syntetycznego
- przewiewne i nie powodują pocenia się kończyn
- przyjemne i przyjazne dla skóry w kolorze białym, łatwe i szybkie do wkładania
- wzmocniona pięta oraz otwór rewizyjny
- można je prać w temp. do 95 st., mankiet samonośny
- 2 rodzaje pończochy długie oraz pończochy z przypięciem do paska.

W celu doboru właściwego rozmiaru należy rano, po przebudzeniu, zmierzyć obwód nogi w 5 miejscach. Punkty pomiarowe na nodze:

Obwód: b = powyżej kostki (największe miejsce) d = na wysokości głowy kości strzałkowej g = 5 cm poniżej krocza. Długość: A - G od podstawy do miejsca pomiaru w punkcie g. Wyroby występują w długościach krótkie oraz długie.

Wskazania

Polecane dla:

- osób długo leżących (spadek ciśnienia krwi)
- w okresie okołoperacyjnym, okołozabiegowym, podczas porodu
- u chorych w salach intensywnej terapii
- profilaktyka dla personelu medycznego

Inne profilaktyczne metody zapobiegania zakrzepicy to



Wczesne uruchomienie chorego, leczenie farmakologiczne, bandażowanie kończyn dolnych

Sposób stosowania

apteka
w sieci

- Nakładać od palców do kostki, rozprowadzić równomiernie na stopie.
- Zwrócić uwagę na dokładne umieszczenie pięty.
- Nałożyć do kolana, dokładnie rozprowadzić na łydce zmniejszając nieco napięcie wynikające z nakładania. Wygładzić wszystkie zgrubienia i zmarszczenia.
- Nałożyć do pełnej długości.
- Usunąć wszystkie zmarszczenia, wygładzić.