



## SilConil żel na blizny 15 g

Cena: 16,94 zł



### Opis słownikowy

Opakowanie	15 g
Postać	żel
Producent	GOFARM
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Postać

Żel

#### Opakowanie

Tubka 15g

#### Działanie

**SilConil** to wyrób medyczny w postaci skutecznego, bezzapachowego żelu silikonowego, przeznaczonego do stosowania na blizny różnego pochodzenia. Preparat zawiera silikony, które tworzą przejrzystą, ochronną powłokę, zapewniającą odpowiednie nawodnienie warstwy rogowej naskórka oraz uelastycznia strukturę skóry. Silikony pomagają również zmniejszyć wielkość blizny oraz jej odbarwienie, a także niwelują negatywne odczucia napięcie tkanek oraz uczucie świądu wokół blizny, zapewniając uczucie ulgi. Wczesna pielęgnacja blizn pomaga przeciwdziałać formowaniu się bliznowców (keloidów) oraz blizn przerostowych.

#### Wskazania

**SilConil** wskazany jest do stosowania na blizny niezależnie od czasu ich powstawania. Może być stosowany u osób dorosłych, jak i dzieci w różnym wieku. **SilConil** zalecany jest w przypadku blizn:

- pourazowych,
- potrądzikowych,



- pooperacyjnych (w tym zabiegach mastektomii i cesarskiego cięcia),
- pooparzeniowych,
- przerostowych i keloidów,
- po terapiach laserowych,
- po usunięciu tatuażu
- oraz rozstępów.

#### **Sposób użycia**

Przed zastosowaniem preparatu należy dokładnie umyć i osuszyć bliznę. Stosować od 2 do 4 razy dziennie. Żel w niewielkiej ilości wmasować w bliznę delikatnymi, kolistymi ruchami przez około 3 minut. Pozostawić do wyschnięcia. Nadmiar żelu usunąć, aby uniknąć zabrudzenia ubrania. Na nałożoną warstwę żelu można stosować kosmetyki.

Stosowania wyrobu medycznego SilConil należy rozpocząć jak najwcześniej po zagojeniu się rany i stosować regularnie przez co najmniej 2 miesiące.

#### **Ostrzeżenia**

Nie stosować na błony śluzowe oczu, nosa i jamy ustnej. Nie stosować na otwarte, niezagojone lub sączące się rany. Nie stosować na nałożone wcześniej preparaty zawierające antybiotyki lub inne leki. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na składniki wyrobu.

Podczas stosowania SilConil należy unikać oddziaływania na bliznę promieni słonecznych, wysokich lub niskich temperatur. Należy również chronić bliznę przed urazami i otarciami. Niewskazane jest korzystanie z sauny i solarium. W razie wątpliwości skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### **Skład**

Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Dimethicone Crosspolymer.