



apteka  
w sieci

# Silikonowe osłonki piersi EasyStart S x 2 szt. CANPOL BABIES



Cena: 13,01 zł

## Opis słownikowy

Producent	CANPOL
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Osłonki na piersi (rozmiar S)

### Opakowanie

- 2 osłonki

- 1 etui


### Opis

Silikonowe osłonki **CANPOL BABIES EasyStart** pomagają chronić obolałe brodawki sutkowe podczas gojenia się podrażnień, zapewniając poczucie komfortu oraz umożliwiając kontynuowanie karmienia. Osłonki wykonane są z miękkiego, delikatnego silikonu wysokiej jakości, który jest pozbawiony zapachu i smaku.

Osłonki są odpowiednio wyprofilowane - ich górna osłonka jest trochę węższa, umożliwiając dziecku przytulanie się bezpośrednio do piersi matki, czując ciepło jej ciała i zapach skóry. Osłonki umieszczone jest w specjalnym etui, idealnym do przechowywania i zapewniającym szybką dezynfekcję w kuchenke mikrofalowej, umożliwiając utrzymanie higieny i czystości osłonek.

### Sposób użycia

Produkt należy utrzymać w czystości. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem, należy umyć osłonki delikatnym płynem i dokładnie

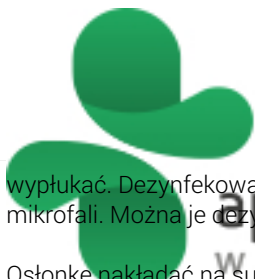

wypłukać. Dezynfekować je we wrzącej wodzie przez około 3 minuty. Osłonki nie nadają się do mycia w zmywarce i podgrzewania w mikrofalach. Można je dezynfekować w gorącej wodzie i sterylizatorze.

Osłonkę nakładać na suchą i czystą pierś. Nie stosować żadnych kremów lub wazeliny. Nie dziurkować ani nie powiększać otworów osłonki, ponieważ może to powodować jej rozpad lub zniszczenie.

Przed założeniem osłonki delikatnie pomasować brodawkę, aby ją wyciągnąć. Następnie przyłożyć osłonkę do piersi tak, aby sutek wypełniał otwór i dokładnie docisnąć ją do piersi. Upewnić się, że część wyprofilowana skierowana jest ku górze lub miejscu gdzie podczas karmienia znajduje się nosek dziecka. Delikatnie przytrzymując osłonkę można rozpocząć karmienie.

Przed zastosowaniem produktu zaleca się konsultację z doradcą laktacyjnym lub położną.

### Dezynfekcja

1. Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem umyć dokładnie etui w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem myjącym, dokładnie wypłukać.

2. Wlać dokładnie 25 ml przegotowanej wody do podstawy.

**WAŻNE!** Wlanie zbyt małej ilości wody może spowodować uszkodzenie etui. Wlanie zbyt dużej ilości wody może spowodować niewłaściwą dezynfekcję.

3. Włożyć osłonki piersi do etui.

4. Szczelnie nałożyć pokrywkę.

5. Zamknięte etui umieścić w kuchence mikrofalowej.

6. Dla mikrofalówek o mocy 750-1000W czas dezynfekcji wynosi 2 minuty. Nie przekraczaj czasu dezynfekcji.

Podczas dezynfekcji etui musi stać na równej powierzchni. Przed wyjęciem etui z mikrofalówki należy poczekać co najmniej 5 minut, aby pojemnik ostygł. Zachować ostrożność podczas wyjmowania i otwierania. Wylać pozostałą wodę z etui przez specjalny otwór, opłukać je i osuszyć. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wyjmowania zdezynfekowanych przedmiotów, ponieważ mogą być gorące. Odczekać 15 minut przed kolejną dezynfekcją, aby etui całkowicie ostygło.

### Uwagi

Produkt nie jest zabawką. Należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dziecka. Czyste osłonki powinny być przechowywane w plastikowym pojemniku dołączonym do opakowania. Sprawdzić je przed każdym użyciem. W przypadku pierwszych oznak zniszczenia lub zużycia - wyrzucić.