



apteka
W sieci

Skin Aid Plaster tkaninowy do cięcia (1m x 6cm)



Cena: 7,19 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Plaster do cięcia
Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	

Opis produktu

Postać

Plaster tkaninowy

Opakowanie

1 szt. 1m x 6cm

Opis

Plaster tkaninowy **SkinAid** to hipoalergiczny produkt dermatologiczny, wykonany z elastycznego materiału. Posiada antyseptyczny opatrunek z dodatkiem **0,3% chlorkeksydyny**, wykazującej działanie pomocnicze, zapobiegające i zwalczające infekcje kontrolujące mikrośrodowisko rany.

Wskazania

Drobne rany i skaleczenia.

Sposób użycia

1. Ranę oczyścić i osuszyć.
2. Plaster wyjąć z opakowania.
3. Plaster do cięcia przyciąć do pożądanego rozmiaru.



4. Plaster nakleić na skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę. Docisnąć krawędzie, aby plaster idealnie przylegał do skóry.
5. W celu usunięcia plastra, chwycić na jego krawędź i pociągnąć wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia.
6. Plaster należy zmieniać codziennie.

Ostrzeżenia

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednio plastra jest uszkodzone. Wyrób do użytku jednorazowego - ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny - potencjalne źródło zakażenia. W przypadku wystąpienia uczulenia lub podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem.