



apteka  
W sieci

## Skin Aid Plaster włókninowy do cięcia (1 m x 8 cm)



Cena: 7,19 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Plaster do cięcia
Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	

### Opis produktu

#### Postać

Plaster tkaninowy

#### Opakowanie

1 szt. 1 m x 6 cm

#### Opis

Plaster włókninowy **SkinAid** to hipoalergiczny produkt dermatologiczny, wykonany z delikatnego i miękkiego materiału. Posiada antyseptyczny opatrunek z dodatkiem **0,3% chlorkeksydy**, wykazującej działanie pomocnicze, zapobiegające i zwalczające infekcje kontrolujące mikrośrodoisko rany.

#### Wskazania

Drobne rany i skaleczenia.

#### Sposób użycia

1. Ranę oczyścić i osuszyć.
2. Plaster wyjąć z opakowania.
3. Plaster do cięcia przyciąć do pożądanego rozmiaru.



4. Plaster nakleić na skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę. Docisnąć krawędzie, aby plaster idealnie przylegał do skóry.
5. W celu usunięcia plastra, chwycić na jego krawędź i pociągnąć wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia.
6. Plaster należy zmieniać codziennie.

#### **Ostrzeżenia**

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednio plastra jest uszkodzone. Wyrób do użytku jednorazowego - ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny - potencjalne źródło zakażenia. W przypadku wystąpienia uczulenia lub podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem.