



apteka
w sieci

Apteka "Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67

Skin Aid Przylepiec włókninowy do cięcia (4,5m x 2,5cm)

Cena: 3,84 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Przylepiec mocujący
Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	

Opis produktu

Postać

Przylepiec włókninowy

Opakowanie

1 szt. 4,5m x 2,5cm

Opis

Przylepiec włókninowy do cięcia **SkinAid** przeznaczony jest do mocowania opatrunków, drenów, instrumentów pomiarowych, sond, cewników, kaniul itp.

Sposób użycia

1. Kawałek przylepca rozwinąć z rolki.
2. Odciąć lub oderwać fragment przylepca.
3. Zaaplikować na czystą, suchą i odtłuszczoną skórę.

Ostrzeżenia

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednio plastra jest uszkodzone. Wyrób do użytku jednorazowego. Nie stosować na uszkodzoną, niezagojoną skórę. Stosować nie dłużej niż przez 24 godziny.



Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67