



apteka w sieci

Skin Aid Zestaw plastrów uniwersalny 24 szt.



Cena: 9,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	24 szt.
Postać	Zestaw plastrów
Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	

Opis produktu

Postać

Plastry

Opakowanie

- 2 szt. 70 x 20mm
- 4 szt. 70 x 20mm
- 4 szt. 70 x 24mm
- 4 szt. 48 x 70mm
- 2 szt. 6 x 10cm
- 2 szt. 38 x 38 mm
- 4 szt. 40 x 10mm

Opis

Plastry **SkinAid** posiadają antyseptyczny opatrunek z dodatkiem **0,3% chlorkeksydney**, wykazującej działanie pomocnicze, zapobiegające i zwalczające infekcje kontrolujące mikrośrodowisko rany.



Wskazania

Drobne rany i skaleczenia.

Sposób użycia

1. Ranę oczyścić i osuszyć.
2. Plaster wyjąć z opakowania.
3. Plaster do cięcia przyciąć do pożądanego rozmiaru.
4. Plaster nakleić na skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę. Docisnąć krawędzie, aby plaster idealnie przylegał do skóry.
5. W celu usunięcia plastra, chwycić na jego krawędź i pociągnąć wzdłuż skóry, aż do całkowitego odklejenia.
6. Plaster należy zmieniać codziennie.

Ostrzeżenia

Nie stosować, jeśli opakowanie bezpośrednio plastra jest uszkodzone. Wyrób do użytku jednorazowego - ponowne użycie jest zabronione, grozi zakażeniem. Po użyciu wyrób traktować jako odpad medyczny - potencjalne źródło zakażenia. W przypadku wystąpienia uczulenia lub podrażnienia skóry należy skonsultować się z lekarzem.