



apteka
w sieci

Smile+ krem mocujący do protez zębowych 40 g



Cena: 10,54 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent	SILESIAN PHARMA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Krem mocujący

Opakowanie

Tubka 40g

Działanie

Krem mocujący **smile+** to wyrób medyczny zapewniający szybkie, długotrwałe i mocne utrzymanie protezy zębowej, zapewniając dodatkowo jej stabilność. **Smile+** uszczelnia protezę, przeciwdziałając przedostawaniu się pod jej powierzchnię resztek pokarmu. Krem mocujący **smile+** jest hipoalergiczny i posiada łagodny, miętowy smak, który nie zaburza smaku potraw.

Wskazania

Mocowanie protez zębowych pełnych i częściowych. Krem może być stosowany przez osoby palące papierosy i przyjmujące leki.

Sposób użycia

1. Przed nałożeniem protezę należy starannie oczyścić i wysuszyć, a usta przepłukać wodą.
2. W przypadku protezy dolnej lub częściowej zaaplikować cienki pasek kremu po obu jej stronach. Dla protezy górnej krem dodatkowo nałożyć na środku powierzchni łączących się z podniebieniem. Należy uważać, aby nie nałożyć kremu zbyt blisko krawędzi protezy.



3. Po upływie 30 sekund docisnąć lub przygryźć protezę.

4. Dla najlepszego efektu odczekać 10 minut przed jedzeniem lub pić.

5. W celu ściągnięcia protezy należy przepłukać usta wodą, po czym delikatnie zdjąć ją, stosując ruch wahadłowy z jednej strony na drugą.

Stosowanie produktu zaleca się zacząć od małych porcji kremu i zwiększyć w razie potrzeby. Po dociśnięciu protezy krem nie powinien wypływać spod jej krawędzi. Zarówno protezę, jak i jamę ustną należy każdorazowo oczyścić z resztek kremu za pomocą ciepłej wody oraz miękkiej szczoteczki. Krem przeznaczony jest do codziennego użytku.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku wystąpienia dyskomfortu, nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników kremu. W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie. Nie należy aplikować wyrobu bezpośrednio do jamy ustnej.

Przechowywać

Krem należy przechowywać w miejscu suchym, niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.

Skład

Cellulose Gum, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium PVM/MA Copolymer, Aqua, Aroma, CI 73360.