



apteka
w sieci

SOFTEYE LIPID emulsja do oczu, pojemniki jednodawkowe 0,3ml x 20 szt.

Cena: 26,49 zł



Opis słownikowy

Producent	SIFI
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Emulsja

Opakowanie

20 szt. pojemników jednodawkowych po 0,3 ml.

Skład

Olej sojowy, naturalne fosfolipidy, trometamol, glicerol, woda oczyszczona.

Nie zawiera konserwantów.

Działanie

SOFTEYE LIPID to sterylna emulsja do oczu bez konserwantów, zawierająca naturalne lipidy. Nawilża i nawadnia powierzchnię oka łagodząc objawy suchości i dyskomfortu ze strony oczu różnego pochodzenia. Emulsja zawiera wodę oraz mieszaninę naturalnych lipidów, które wykazują właściwości nawilżające i nawadniające. Po podaniu do worka spojówkowego zarówno wodne, jak i lipidowe składniki preparatu **SOFTEYE LIPID** łączą się z filmem łzowym tworząc barierę ochronną, która ogranicza odparowywanie wody.

Wskazania



Łagodzenie dyskomfortu ze strony oczu związanego ze stosowaniem soczewek kontaktowych.

Sposób użycia

apteka
w sieci

Zakraplać 1 kroplę preparatu **SOFTEYE LIPID** do worka spojówkowego 4 razy dziennie lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

- Przed zastosowaniem należy umyć/zdezynfekować ręce.
- Upewnić się, że pojemnik jednodawkowy jest nienaruszony.
- Oderwać pojemnik jednodawkowy od paska.
- Otworzyć, przekręcając i odrywając górną część.
- Zakropić preparat do oka, unikając dotykania oka lub jakiegokolwiek innej powierzchni końcówką pojemnika.

Zawartość pojemnika powinna zostać zużyta bezpośrednio po otwarciu. Wszelkie pozostałości produktu nie mogą być używane, ponieważ produkt nie zawiera konserwantów, a pozostałości produktu mogą ulec zanieczyszczeniu, tym samym narażając oko na ryzyko zakażenia.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Nie zamrażać. Po otwarciu zaleca się przechowywanie pozostałych pojemników jednodawkowych w tej samej aluminiowej torebce. Pojemniki jednodawkowe należy wykorzystać w ciągu 20 dni po otwarciu aluminiowej torebki.

Ostrzeżenia

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Nie stosować produktu jeśli pojemnik jednodawkowy jest otwarty lub uszkodzony.

Typ

Wyrób medyczny