


Stabilizator nadgarstka z szyną (rozmiar L-XXL) 1 szt. SALVI ORTOPEDIC

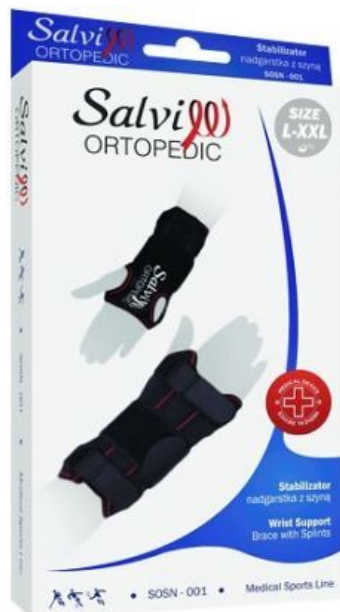

Cena: 45,55 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Stabilizator nadgarstka
Producent	PMT
Rejestracja	

Opis produktu

Postać

Stabilizator nadgarstkowy (rozmiar L-XXL: 18-26cm)

Opakowanie

1 szt.

Działanie

Stabilizator nadgarstkowy wykonany jest z elastycznego, oddychającego materiału z funkcją odprowadzania nadmiaru potu. Wyrób medyczny posiada dwustronny rzep VELCRO, umożliwiający regulację siły ucisku. Stabilizator wspomaga leczenie po zabiegach chirurgicznych, po skręceniach oraz złamaniach. Produkt sprawdza się również przy przeciążeniach oraz stanach zapalnych tkanek miękkich, stawów i kości, jak również pomaga przy zespole cieśni nadgarstka.

Wskazania

Stabilizator nadgarstkowy wskazany jest:

- w stanach pęknięcia więzadeł, zwiększonej ilości płynu w stawie nadgarstkowym,
- po przebytych urazach stawu nadgarstkowego,



- w zmianach przeciążeniowych, zwyrodnieniowych i zapalnych,
- w zespołach bólowych, w celu stabilizacji stawu,
- przy wzmożonym wysiłku, w celu zabezpieczenia stawu przed urazami,
- profilaktycznie w sporcie.

Sposób użycia

- Należy upewnić się, że rozmiar produktu jest odpowiednio dobrany.
- Rozpiąć rzepy.
- Nałożyć stabilizator na rękę dopasowując ułożenie szyny.
- Docisnąć i zapiąć rzepy, upewniając się, że został ograniczony ruch nadgarstka.

Ostrzeżenia

Wyrób medyczny jest przeznaczony do użytku indywidualnego. Produkt nie powinien być używany do innych celów lub w połączeniu z innymi produktami. Po założeniu, należy upewnić się, że stabilizator nie blokuje przepływu krwi. Nie należy zapinać rzepów zbyt mocno. W przypadku dyskomfortu, mrowienia, drętwienia itp. należy poluzować rzepy lub zdjąć ortezę. Jeżeli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy sprawdzić skład materiałów z jakich wykonany jest wyrób. W przypadku wystąpienia uczulenia, należy zdjąć stabilizator i przemyć skórę wodą. Dalsze stosowanie trzeba skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować na otwarte rany oraz uszkodzoną skórę. Produkt można zakładać na odzież.

Instrukcja prania

- Rzepy należy spiąć razem.
- Prać ręcznie w temperaturze 30°C.
- Suszyć płasko na ręczniku.
- Nie wykręcać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować.
- Przed kolejnym użyciem należy upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy.
- Materiały termoplastyczne należy czyścić wilgotną ściereczką i wytrzeć do sucha.

Skład

Powierzchnia zewnętrzna składa się z materiału termoplastycznego. Powierzchnia wewnętrzna to gąbka dwustronnie laminowana pokryta tkaniną nylonową. Rodzaj materiału: 100% Polyester.