


# Stabilizator stawu kolanowego z szynami 1 szt. SALVI ORTOPEDIC

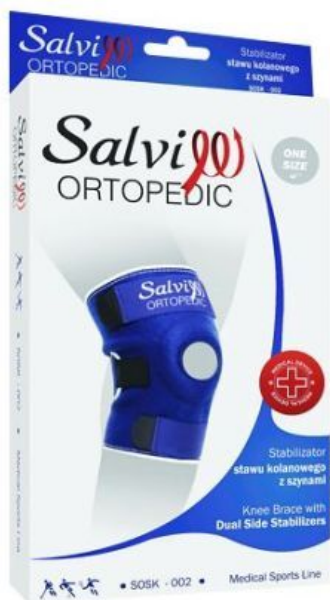

Cena: 63,78 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Stabilizator stawu kolanowego
Producent	PMT
Rejestracja	

## Opis produktu

### Postać

Stabilizator stawu kolanowego (rozmiar uniwersalny)

### Opakowanie

1 szt.

### Działanie

Stabilizator stawu kolanowego **SALVI ORTOPEDIC** pomaga zmniejszać dolegliwości bólowe i stany zapalne. Wyrób medyczny posiada wbudowane stalki oraz taśmy, zapewniając wsparcie boczne i przysrodkowe, również dla więzadeł i mięśni. Stabilizator posiada odpowiednie wyprofilowanie oraz wycięcie, które pomagają utrzymać rzepkę na swoim miejscu. Orteza pozwala na naturalne zgięcie stawu, dzięki czemu sprawdza się również w rehabilitacji leczniczej, w profilaktyce i podczas aktywności sportowych.

### Wskazania

Stabilizator polecany jest dla osób z kontuzjami, osłabionym, niestabilnym kolaniem.

### Sposób użycia

- Należy upewnić się, że rozmiar produktu jest odpowiedni.



#### • Rozpiąć rzepy.

- Założyć stabilizator na kolano, dopasowując otwór na rzepkę.
- Upewnić się, że szyny po obu stronach są odpowiednio dopasowane do stawu kolanowego.
- Docisnąć i zapiąć rzepy, upewniając się że został ograniczony ruch kolana.

#### Ostrzeżenia

Wyrób medyczny jest przeznaczony do użytku indywidualnego. Produkt nie powinien być stosowany do innych celów lub w połączeniu z innymi produktami. Po założeniu należy upewnić się, że rzepy nie są zapięte zbyt mocno i nie blokują przepływu krwi. W przypadku dyskomfortu, mrowienia itp. stabilizator należy poluzować lub zdjąć. Jeżeli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy sprawdzić skład materiałów z jakich wykonany jest wyrób. W przypadku wystąpienia uczulenia, należy zdjąć produkt, a skórę przemyć wodą. Dalsze stosowanie należy skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować na otwarte rany lub uszkodzoną skórę. Produkt można zakładać na odzież. Stosowanie produktów wykonanych z neoprenu nie powinno przekraczać 4 godzin.

#### Instrukcja prania

- Rzepy należy spłukać razem.
- Prać ręcznie w temperaturze 30°C.
- Suszyć płasko na ręczniku.
- Nie wykręcać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować.
- Przed kolejnym użyciem, należy upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy.
- Materiały termoplastyczne należy czyścić wilgotną ściereczką, wytrzeć do sucha.

#### Przechowywanie

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Należy chronić przed wilgocią, bezpośrednim działaniem ciepła oraz światła słonecznego.

#### Skład

Panel neoprenowy: górna i dolna tkanina 100% poliester, tkanina wewnętrzna 100% neopren, 85% poliamid, 15% spandex. Rodzaj materiału: 72% poliester, 28% neopren.