




# Stabilizator stawu skokowego z taśmą (rozmiar M-L) 1 szt. SALVI ORTOPEDIC

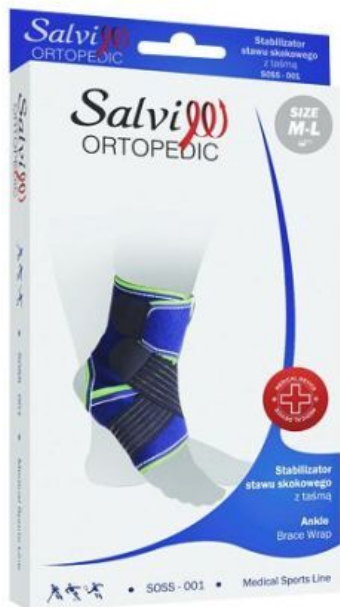

Cena: 45,55 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Stabilizator stawu skokowego
Producent	PMT
Rejestracja	

## Opis produktu

### Postać

Stabilizator stawu skokowego (rozmiar M-L: 24-26cm)

### Opakowanie

1 szt.

### Działanie

Stabilizator **SALVI ORTOPEDIC** pomaga podtrzymać staw oraz uszkodzone tkanki mięśni, ścięgien i więzadeł. Stabilizator zapobiega nieprawidłowym ruchom, a taśmy dociągające zapewniają dodatkowe wsparcie i stabilność. Stabilizator idealnie dopasowuje się do kostki, dzięki czemu umożliwia elastyczny kontrolowany ruch.

Wyrób medyczny redukuje bolesność i obrzęk, sprawdza się po zabiegach, operacjach oraz po opatrunkach gipsowych i w rehabilitacji leczniczej. W profilaktyce, podczas wysiłku i podczas uprawiania sportu, stabilizator minimalizuje ryzyko kontuzji i innych urazów.

### Wskazania

Skrećenia, zwichnięcia i inne urazy obszaru wokół kostki.

### Sposób użycia



- Należy upewnić się, że rozmiar produktu jest odpowiedni dla obwodu kostki.
- Rozpiąć rzepy.
- Włożyć stopę w stabilizator, tak aby pięta i palce pozostały odsłonięte.
- Zapiąć rzepy na podbiciu oraz w kostce.
- Taśmy boczne poprowadzić do góry na krzyż, dociągnąć i przymocować rzepy w okolicy kostki.
- Upewnić się, że został ograniczony ruch stopą.

#### Ostrzeżenia

Wyrób medyczny jest przeznaczony do użytku indywidualnego. Produkt nie powinien być stosowany do innych celów lub w połączeniu z innymi produktami. Po założeniu należy upewnić się, że rzepy nie są zapięte zbyt mocno i nie blokują przepływu krwi. W przypadku dyskomfortu, mrowienia itp. stabilizator należy poluzować lub zdjąć.

Jeżeli objawy się utrzymują, należy skonsultować się z lekarzem. Należy sprawdzić skład materiałów z jakich wykonany jest wyrób. W przypadku wystąpienia uczulenia, należy zdjąć produkt, a skórę przemyć wodą. Dalsze stosowanie należy skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować na otwarte rany oraz uszkodzoną skórę. Produkt można zakładać na odzież. Stosowanie produktów wykonanych z neoprenu nie powinno przekraczać 4 godzin.

#### Instrukcja prania

- Rzepy należy spiąć razem.
- Prać ręcznie w temperaturze 30°C.
- Suszyć płasko na ręczniku.
- Nie wykręcać, nie suszyć w suszarce bębnowej, nie prasować.
- Przed kolejnym użyciem, należy upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy.
- Materiały termoplastyczne należy czyścić wilgotną ściereczką, wytrzeć do sucha.

#### Przechowywanie

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Należy chronić przed wilgocią, bezpośrednim działaniem ciepła oraz światła słonecznego.

#### Skład

Panel neoprenowy: górna i dolna tkanina wykonane są w 100% z poliestru, tkaniny wewnętrzne wykonane są w 100% z neoprenu. Powierzchnia zewnętrzna składa się z materiału termoplastycznego. Powierzchnia wewnętrzna to gąbka dwustronnie laminowana, pokryta tkaniną nylonową. Rodzaj materiału: 56% Neopren, 26% Polyester, 13% Nylon, 5% Elastan.