



apteka
w sieci

SutriHeal Forte 10% maść do gojenia ran 2 g

Cena: 12,17 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	Tubka 2 g
Postać	maść
Producent	HELP SA
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Rafinowana żywica świerku norweskiego (Picea abies)

Opis produktu

Opis

Działanie maści **SutriHeal Forte 10%** oparte jest na biologicznych właściwościach związków obecnych w żywicy świerku norweskiego (*Picea abies*). Maść stosowana jest miejscowo w celu leczenia zakażonych i niezakażonych ran w domowych i ambulatoryjnych warunkach. Formuła preparatu została wzbogacona w emolienty, które zapewniają nawilżenie i ochronę skóry wokół rany.

Wskazania

Maść **SutriHeal Forte 10%** stosowany jest w celu wspomaganie gojenia zakażonych i niezakażonych ran, takich jak:

- ostre rany (skaleczenia, zadrapania, rany po zabiegach chirurgicznych i ortopedycznych),
- rany powierzchniowe (otarcia, problemy podologiczne, pęknięcia naskórka, powierzchniowe uszkodzenia naskórka),
- rany przewlekłe (odleżyny, oparzenia, zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenia podudzi).

Sposób użycia

1. Otarcie, pęknięcie skóry lub rana powinny zostać oczyszczone wodą i osuszone.
2. Maść SutriHeal Forte 10% należy nakładać bezpośrednio na zmieniony obszar 1-2 razy dziennie.
3. W razie potrzeby miejsce aplikacji zabezpieczyć bandażem lub opatrunkiem przepuszczającym powietrze.
4. Po każdej zmianie opatrunku zaleca się oczyścić ranę z pozostałości maści, używając np. SutriSept Płyn.



Aplikację maści można powtarzać 1 lub 2 razy dziennie do całkowitego zagojenia się rany. Unikać dostania się maści do oczu lub ust.

Skład

apteka
w sieci

Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Norway Spruce (Picea abies) Resin, Alcohol Denat., Cera Microcristallina, Sorbitan Oleate, Cera Alba, Hydrogenated Castor Oil, Stearic Acid.