



SutriSept Płyn, 250 ml

W sieci

Cena: 38,18 zł



Opis słownikowy

Producent	VERCO
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Roztwór

Opakowanie

Pojemnik 250 ml

Skład

0,1% poliheksanid (PHMB), substancje pomocnicze

Działanie

SutriSept nawilża, oczyszcza i iryguje rany różnego pochodzenia. Znajduje zastosowanie przy dezynfekcji materiałów medycznych: opatrunków czy bandaży. **SutriSept** w płynie zapewnia bezbolesne działanie podczas oczyszczania ran. Wykazuje właściwości przeciwdrobnoustrojowe, dzięki czemu zapobiega tworzenia się biofilmu bakteryjnego, stwarzając korzystne warunki dla szybszego gojenia się ran. Wygodny atomizer znacznie ułatwia aplikację płynu.

Wskazania

Oczyszczenie, irygacja ran różnego pochodzenia: odleżyny, owrzodzenia żyłne, owrzodzenia goleni, po zabiegach chirurgicznych, stopa cukrzycowa, przewlekłe rany pourazowe, oparzenia 1. i 2. stopnia, pielęgnacja szwów pooperacyjnych

Sposób użycia



PRZED ZAŁOŻENIEM OPATRUNKU

apteka
w sieci

- Przeemyć dokładnie ranę płynem **SutriSept**
- Rany z głęboką i rozległą tkanką martwiczą przemywać przez 10-15 minut (przed założeniem mokrego opatrunku)
- Nie powinno się spłukiwać roztworu po aplikacji. Należy odpowiednio zabandażować ranę.

PO NAŁOŻENIU OPATRUNKU

- Nasączyć materiały opatrunkowe odpowiednią ilości płynu SutriSept
- Czynność powtarzać co dwa dni, aby zapobiegać przywieraniu opatrunku

W przypadku większych i głębszych ran, zaleca się aby ich powierzchnię najpierw przemyć płynem SutriSept, a następnie wypełnić produktem **SutriSept Hydrożel na rany**. Jeśli rany są mniejsze wystarczy użyć tylko płynu.

Ostrzeżenia

Przed użyciem produktu należy najpierw zapoznać się z treścią ulotki i instrukcją stosowania. Nie stosować do infuzji ani w iniekcjach, nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników, nie pić, nie spożywać roztworu.

Przechowywać z dala od dzieci. Jeśli nakrętka jest pęknięta, lub warstwa ochronna przed nią rozdarta nie należy stosować produktu. Zużyć w ciągu 8 tygodni od otwarcia.