

Taśma kinezyologiczna PASOTAPE (niebieska) 5m x 5cm

Cena: 19,98 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Taśma kinezyologiczna

Opakowanie

1 szt. 5 m x 5 cm

Opis

Taśma kinezyologiczna wpływa na poprawienie funkcjonowania mięśni i stabilność stawów, jak również wspiera miejscowe krążenie limfy. Taśma poprawnie stosowana podtrzymuje i stabilizuje mięśnie oraz stawy bez ograniczenia ich naturalnej ruchliwości, dzięki czemu może wspomagać czas regeneracji i poprawiać sprawność fizyczną. Wyrób redukuje ciśnienie śródmiąższowe w miejscu występującego stanu zapalnego, przez co pomaga łagodzić ból wywołany uciskiem oraz wspomaga drenaż limfatyczny.

Wskazania

Taśma kinezyologiczna może być stosowana jako środek wspomagający naturalny sposób leczenia urazów, w rehabilitacji i medycynie sportowej.

Sposób użycia

Taśmę kinezyologiczną przyciąć na wymaganą długość. Taśmę nakleić w miejscu leczenia, zaczynając od dołu i w zależności od pożądanego efektu, zwracając uwagę na to, aby powierzchnia skóry była gładka i napięta. Taśma może być pozostawiona na miejscu na kilka dni.



Uwagi

Taśma kinezyjologiczna została przebadana dermatologicznie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nadwrażliwości nie stosować lub ograniczyć czas stosowania. Wyrób przeznaczony jest do jednorazowego użytku - nie stosować ponownie. Nie stosować bezpośrednio na uszkodzoną skórę.