

# TENA PANTS Proskin Majtki chłonne NORMAL (rozmiar L) 30 szt.



Cena: 78,65 zł

## Opis słownikowy

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Opakowanie  | 30 szt.                   |
| Postać      | Majtki chłonne            |
| Producent   | ESSITY HYGIENE AND HEALTH |
| Rejestracja | Wyrób medyczny inny       |

## Opis produktu

### Postać

Majtki chłonne

### Opakowanie

30 szt.

### Opis

**TENA PANTS ProSkin NORMAL** to majtki chłonne (poziom chłonności: 5,5/8) do stosowania w średnim i ciężkim stopniu nietrzymania moczu, zakładane jak zwykła bielizna. Majtki chłonne zapewniają **Potrójną Ochronę** przed przeciekaniem, długotrwałą suchość i miękkość oraz wspomagają zdrowie skóry. Produkt wykorzystuje **Technologię FeelDry Advanced**, która zapewnia szybsze wchłanianie moczu i zamknięcie go z dala od skóry, jak również zabezpiecza przed wydostaniem się nieprzyjemnego zapachu na zewnątrz. Majtki chłonne wykonane są z oddychającego materiału, dzięki czemu gwarantują uczucie komfortu i wspomagają zdrowie skóry.

Produkty **TENA PANTS ProSkin** zostały przebadane i otrzymały akredytację **Skin Health Alliance** - wiodącej, niezależnej instytucji zrzeszającej ekspertów zajmujących się zdrowiem skóry. Otrzymanie akredytacji **Skin Health Alliance** wymaga spełnienia szeregu rygorystycznych wymagań dotyczących wpływu produktu na zdrowie skóry. Akredytacja **Skin Health Alliance** daje pewność, że produkty **TENA Pants ProSkin** są przyjazne dla skóry.

### Wskazania



Majtki chłonne TENA PANTS ProSkin NORMAL wskazane są do codziennego stosowania w średnim i ciężkim nietrzymaniu moczu. Bielizna przeznaczona jest dla osób chodzących, poruszających się choćby po domu, o rozmiarze 100-135cm.

#### Sposób użycia

##### Instrukcja korzystania:

1. Majtki włożyć jak zwykłą bieliznę.

##### Po wykorzystaniu:

1. Aby zdjąć, po użyciu rozerwać majtki chłonne wzdłuż szwów bocznych.

2. Po zdjęciu zrolować majtki chłonne i zakleić rzepem.


3. Zrolowane majtki wyrzucić do kosza na śmieci.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### Galeria



To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

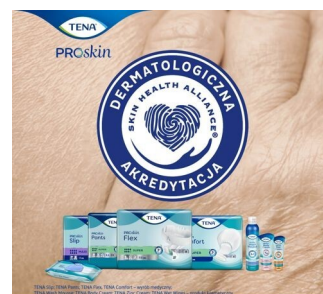

To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.