

Termofor gumowy ECO w pokrowcu 2L SANITY

Cena: 21,24 zł



Opis słownikowy

Postać	Termofor
Producent	ALBERT POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Termofor

Opakowanie

1 szt.

Opis

Termofor **ECO** firmy **SANITY** to produkt wykonany z wysokiej jakości naturalnej gumy, posiadający ryflowane ścianki. Termofor jest odpowiedni do stosowania w celach profilaktycznych i leczniczych do ogrzania ciała oraz łagodzenia miejscowych dolegliwości bólowych. Materiał z którego wykonany jest termofor zapewnia idealną termikę, a pokrowiec przyjemny dotyk dla ciała.

Sposób użycia

1. Przygotować ciepłą wodę o temperaturze ok. 50°. Nie należy stosować wrzątku ani wody, która może powodować oparzenia. Zakrętkę odkręcić i powoli napełnić termofor wodą do 3/4 jego objętości. Podczas napełniania należy trzymać termofor za szyjkę w pozycji pionowej.
2. Pozbyć się nadmiaru powietrza, poprzez powolne przechylenie termoforu, do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla wygody można oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.
3. Dokładnie zakręcić kurek i sprawdzić jego szczelność odwracając termofor do dołu, po czym założyć pokrowiec.



Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.
Ogrodowa 40, Racibórz
+48 32 415 14 67