

Termofor z pestek wiśni w pokrowcu (różowy) 1 szt. APTEO

Cena: 19,41 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	Termofor
Producent	SYNOPTIS PHARMA
Rejestracja	

Opis produktu

Postać

Termofor

Opakowanie

1 szt.

Działanie

Termofor APTEO wykonany jest z naturalnego surowca - pestek wiśni z polskich upraw umieszczony w pokrowcu wewnętrznym ze 100% bawełny. Zewnętrzny pokrowiec wykonany jest z tkaniny Minky (poliester). Termofor przeznaczony jest do miejscowego schładzania lub rozgrzewania ciała.

Wskazania

Stosowanie na zimno:

termofor przynosi ulgę w przypadku zwichnięć, bólów głowy, guzów, migren, ukąszeń owadów i lekkich poparzeń.

Stosowanie na ciepło:

przynosi ulgę w przypadku kolk pokarmowych u niemowląt, dolegliwości związanych z bólem brzucha, bólem kręgosłupa, bólami mięśni i stawów, poprawia krążenie krwi i wykazuje działanie relaksacyjne, może być stosowany przez matki karmiące do rozgrzewania piersi.



Sposób użycia

apteka
w sieci

Termofofor należy podgrzewać i schładzać bez pokrowca zewnętrznego.

Jako zimny okład:

- termofofor umieścić w zamrażarce na ok. 30-60 minut.

Jako ciepły okład:

- termofofor umieścić w mikrofalówce o mocy 300-600 W na maks. 1 minutę,
- termofofor umieścić w piekarniku rozgrzanym do 120°C na ok. 4 minuty,
- termofofor umieścić na grzejniku (kaloryferze) aż będzie wystarczająco podgrzany i ciepły.

Gotowy do użycia wyrób włożyć w pokrowiec zewnętrzny i przyłożyć do miejsca ciała wymagającego oziębienia lub rozgrzania. Wyrób będzie utrzymywał temperaturę do 30 minut w zależności od wielkości termofoforu i temperatury otoczenia.

Czyszczenie

W przypadku zabrudzenia pokrowiec należy prać ręcznie.

Ostrzeżenia

Unikać silnego nacisku np. siadania na wyrobie - grozi to rozerwaniem pokrowca. Nie przegrzewać wyrobu powyżej zalecanych warunków ponieważ grozi to oparzeniem. Nie używać uszkodzonego termofoforu. Termofofor należy schładzać i rozgrzewać bez pokrowca zewnętrznego, gdyż może spowodować to jego zniszczenie! Nie przegrzewać wyrobu powyżej zalecanych warunków, ponieważ grozi to zapłonem pestek. Podgrzewać w mikrofalówce o mocy 300-600W przez maks. 1 min.

Skład

Wkład materiałowy 100% bawełna, wypełnienie pestek wiśni 180g, pokrowiec zewnętrzny 100% poliester.