




# Test do wykrywania narkotyków w moczu THC-Strip 1 sztuka

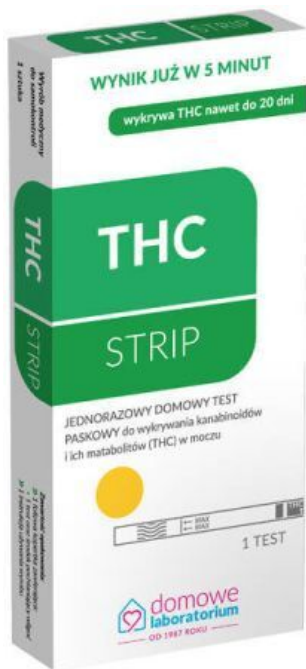

Cena: 7,06 zł

## Opis słownikowy

Producent	HYDREX
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Test

### Opakowanie

1 sztuka

### Działanie

THC Strip jest produktem do wykrywania obecności marihuany lub haszyszu w moczu. Ma czułość 50 ng/ml, a badanie jest wiarygodne w 99% przypadków. Należy pamiętać o tym, że THC utrzymuje się w organizmie człowieka przez 5-20 dni od przyjęcia narkotyku.



## Sposób użycia

Przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertę. Wyjąć test, chwytając za część nadrukowaną (górną). **Nie dotykać innych części testu.** środek do pochłaniania wilgoci zawarty w opakowaniu wyrzucić. Chwycić pasek testowy i zanurzyć powoli w próbce moczu. Po 10-15 sekundach wyjąć test z próbki i umieścić na płaskiej powierzchni. Wynik testu należy odczytać pod koniec 5 minuty.