



apteka  
W Sieci

## Test na infekcje w moczu x 2 szt. myCARE



Cena: 29,05 zł

### Opis słownikowy

Producent	CARE diagnostica
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

#### Postać

Test

#### Opakowanie

2 foliowe opakowania, każde zawierające pasek testowy, środek osuszający i instrukcję użycia.

#### Opis

Test **myCARE** pozwala wykryć białko, azotyny i leukocyty w moczu. Ich obecność jest objawem występowania zakażenia układu moczowego.


#### Uwagi

Zaleca się, aby w celu przeprowadzenia testu, próbka była pobrana z pierwszego porannego moczu, gdyż wczesny mocz posiada najlepszą koncentrację. Mocz zastosowany w teście nie powinien mieć kontaktu z wodą z toalety ani środkami dezynfekującymi lub czyszczącymi.

Test nie powinien być przeprowadzany podczas ani trzy dni po miesiączce. Próbka moczu nie powinna być zanieczyszczona wydzieliną pochwową, gdyż może to powodować błędny wynik.

#### Sposób użycia

1. Jedno opakowanie foliowe otworzyć we wskazanym miejscu i wyciągnąć pasek testowy. Nie dotykać pola testu i wyrzucić załączony

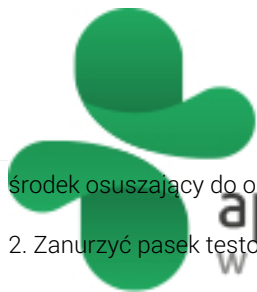

Środek osuszający do odpadów domowych.

2. Zanurzyć pasek testowy w próbce moczu, upewniając się, że wszystkie trzy pola testu są zamoczone przez około dwie sekundy.
3. Wyjąć z moczu pasek testowy i wytrzeć nadmiar moczu o krawędź pojemnika.
4. Pasek testowy umieścić poziomo na otwartym opakowaniu, aby uniknąć rozlania moczu na inne powierzchnie. Odczekać 60 sekund.

#### Odczytywanie wyniku

Odczytać wynik zgodnie ze zdjęciami umieszczonymi w instrukcji obsługi. Należy zwrócić uwagę, że możliwa jest inna intensywność koloru, niż podana. Odczytać wynik z każdego parametru z osobna. Należy zignorować zmiany kolorów na krawędziach testu albo zmiany koloru po ponad 2 minutach.