



Test na krew utajoną w kale POLY-CHECK x 1 szt.

Cena: 29,80 zł



Opis słownikowy

Producent	VEDALAB
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Test na krew utajoną w kale

Opakowanie

1 ZESTAW

Skład

ZESTAW ZAWIERA: Płytkę testową, strzykawkę do pobierania kału, foliowe torebki oraz podkładki papierowe.

Działanie

Badanie testem wykrywa schorzenia układu pokarmowego i nowotwór jelita grubego. Test na krew utajoną w kale POLY-Check pozwala na wykrycie krwawienia utajonego charakteryzującego się bardzo małą ilością krwi, która jest makroskopowo niewidoczna w stolcu. Obecność krwi w kale (krew utajona w kale) może sugerować różne zaburzenia układu pokarmowego i może być spowodowana powstającymi zmianami przednowotworowymi, rakiem jelita grubego, polipami, chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym zapaleniem jelit czy zespołem jelita drażliwego.

Nowotwór jelita grubego rozwija się bardzo powoli, zwykle kilkanaście lat a wczesne stadia z reguły nie powodują żadnych dolegliwości. Badania przesiewowe (screening) polega na przeprowadzeniu badania wśród osób bez objawów choroby, zwiększając prawdopodobieństwo wykrycia raka jelita grubego we wczesnym stadium rozwoju.

Wykonanie jest proste i łatwe trwa 10min.



Test na krew utajoną w kale, profilaktyka raka jelita grubego. Czynniki sprzyjające zachorowaniu na raka jelita grubego takie jak:

- czynniki związane z dietą, dojrzały wiek, stany zapalne jelita grubego, otyłość
- nadciśnienie tętnicze
- występowanie polipów w jelicie grubym
- zachorowania u osób spokrewnionych, wcześniejsze występowanie innych nowotworów złośliwych oraz predyspozycje genetyczne

Dedykowany w profilaktyce raka jelita grubego, osobom z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, celiakia, osobom mającym w rodzinie chorych na raka jelita.

Sposób użycia

Badanie wykonuje się z trzech, pobranych w kolejnych dniach, próbek kału za pomocą tego samego zestawu testowego.