



apteka
w sieci

TEST T1 Szybki test antygenowy na Trichomonas Vaginalis x 1 szt.

Cena: 49,20 zł



Opis słownikowy

Producent	FARMABOL
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Test

Opakowanie

- Jedna torebka foliowa: zawiera jedną kasetkę testową T.V oraz 1 środek osuszający.
- Jeden 0,5ml zakraplacz.
- Jedna miseczka na mocz.
- Probówka na próbkę (zakrętka w kolorze fioletowym), 0,3ml / probówkę zawiera: 0,01% soli fizjologicznej Tris, 0,05%zydku sodu, 0,1% Tween-20, detergent (PH 7,5).
- Instrukcja obsługi

Opis

TEST T1 jest szybkim testem antygenowym na Trichomonas Vaginalis (rzęsistek pochwy) do samodzielnego wykonania w domu. Rzęsistek pochwy Trichomonas vaginalis jest pasożytem z grupy wiciowców, bytujący w drogach moczowo-płciowych człowieka, który wywołuje chorobę zakaźną rzesistkowicę.



Rzesistkowica w swoim przebiegu może mieć charakter ostry i przewlekły. Stany przewlekłe u kobiet powodują mikroskopowe zmiany w komórkach nabłonka szyjki macicy, a u mężczyzn przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego. Występowania rzesistkowicy zwiększa ryzyko występowania innych chorób wenerycznych: chlamydiozy, kiły, rzeżączki.

Wskazania

Jakościowe wykrywanie w moczu antygenów pierwotniaka *Trichomonas Vaginalis*.

Ostrzeżenia

Nie pobierać próbek moczu zawierających krew., gdyż może to wpłynąć na wyniki testu. Kasetkę testową należy wykorzystać w ciągu 1 godziny po otwarciu opakowania aby zapobiec wpływowi wilgoci na dokładność testu. Probówka zawiera neutralny bufor. Jeśli dostanie się do oczu lub na skórę, należy przemyć obszar wodą z kranu przez 1 do 2 minut, aby uniknąć możliwych alergii.

Nie jest konieczne mocne mieszanie próbki moczu z zawartym w niej buforem w probówce. Jeśli na powierzchni cieczy unosi się zbyt wiele bąbelków; po wymieszaniu odstawić probówkę na 3 do 5 minut, w celu zniknięcia pęcherzyków, a następnie dopiero przystąpić do testu.

Sposób użycia

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi dołączonej do opakowania.