

ThermaCare Kompresy rozgrzewające (duże) x 2 szt.

Cena: 28,51 zł



Opis słownikowy

Producent	ANGELINI PHARMA
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Plaster

Opakowanie

2 szt.

Działanie

Kompresy rozgrzewające **ThermaCare** posiada opatentowane komórki ciepłe z żelazem, dzięki którym łagodzi ból mięśni i (lub) stawów związanych z nadmiernym wysiłkiem, skręceniami, przeciążeniem oraz zapaleniem stawów. Działanie kompresów utrzymuje się nawet do 16 godzin (8 podczas noszenia i 8 po zdjęciu) i poprawia ogólną mobilność.

Produkt nie zawiera substancji leczniczych.

Wskazania

Łagodzenie bólu mięśni i/lub stawów związanych z nadmiernym wysiłkiem, skręceniami, przeciążeniem oraz zapaleniem stawów. Produkt przeznaczony jest do stosowania na dolne okolice pleców i stawów biodrowych.

Sposób użycia

Bezpośrednio przed zastosowanie należy rozerwać saszetkę z kompresem. Osiągnięcie temperatury terapeutycznej kompresu może zająć do 30 minut.



Kompres umieścić w miejscu bólu, ciemniejszymi komórkami ciepłymi skierowanymi w stronę skóry. Osoby w wieku 55 lat lub starsze powinny zakładać kompres na warstwę ubrania (lub materiału), tak aby kompres nie przylegał bezpośrednio do skóry.

Nie stosować dłużej niż przez 8 w okresie 24 godzin.

Uwagi

Nie należy stosować kompresu podczas snu. Kompresy **ThermaCare** może powodować oparzenia i (lub) pęcherze skórne. Podczas jego stosowania należy często kontrolować stan skóry. W przypadku stwierdzenia podrażnienia lub oparzenia, należy natychmiast usunąć kompres.

Osoby z cukrzycą, problemami z krążeniem, chorobą serca, reumatoidalnym zapaleniem stawów oraz kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem kompresu.

Każda komórka ciepła zawiera żelazo (ok. 2 gramów). W przypadku połknięcia należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Jeśli dojdzie do kontaktu zawartości komórki ciepłej ze skórą lub oczami, należy usunąć kompres, przemyć dotknięty obszar wodą i niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Nigdy nie należy podgrzewać kompresu w kuchence mikrofalowej ani próbować go podgrzać powtórnie, gdyż może się zapalić. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt.

Należy zaprzestać stosowania kompresu i skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- pojawienia się uczucia dyskomfortu, pieczenia lub wystąpienia obrzęku, wysypki lub innych zmian na skórze, które utrzymują się podczas stosowania kompresu,
- nasilenia dolegliwości bólowych lub utrzymania się bólu po 7 dniach stosowania kompresu.

Ostrzeżenia

Kompresu nie należy używać:

- w przypadku stwierdzenia wycieku zawartości komórek ciepłych lub jeśli kompres jest uszkodzony lub rozdarty,
- jednocześnie z lekami stosowanymi miejscowo (na skórę),
- na zmienioną chorobowo, podrażnioną lub uszkodzoną skórę,
- w miejscu siniaków lub obrzęków, które wystąpiły w ciągu ostatnich 48 godzin,
- u osób, które nie są w stanie przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących użytkowania kompresu,
- na obszary ciała z zaburzonym czuciem temperatury z innymi produktami emitującymi ciepło (np. poduszkami grzewczymi, plastrami rozgrzewającymi itp.),
- u osób które nie są w stanie samodzielnie usunąć kompresu, w tym dzieci i niektórych osób w podeszłym wieku.