



## URGO Urgostrips paski do zamykania ran x 10 szt.

Cena: 13,46 zł



### Opis słownikowy

Producent	URGO
Rejestracja	Opatrunek

### Opis produktu

#### Postać

Paski do zamykania ran (100 mm x 6 mm)

#### Opakowanie

10 szt.

#### Opis

Sterylny pasek **URGO URGOSTRIPS** pomaga zamknąć rany cięte, po wypadkach, operacjach oraz zapewniając dodatkowe zabezpieczenie przed rozejściem się szwów. Paski przyspieszają i ułatwiają gojenie się ran oraz zmniejszają możliwość powstawania blizn. Paski są hipoalergiczne, przez co nie podrażniają skóry. Wykonane są z oddychającego materiału, który nie przepuszcza wilgoci i bakterii, przez co zapewniają właściwą regenerację skóry. Paski są łatwe w użyciu, także w warunkach domowych.

#### Wskazania

Paski **URGOSTRIPS** wskazane są do szybkiego zamknięcia powierzchniowych ran i chirurgicznych nacięć, szczególnie:

- do zamknięcia ran w przypadku drobnych zabiegów o nagłym charakterze, chirurgii plastycznej, dermatologicznej i ograniczonych nacięć pooperacyjnych (< 2,5cm),
- do początkowego zamknięcia ran powierzchniowych lub ran bez naprężeń rozciągających,
- do stosowania jako pomocnicze wzmocnienie między szwami lub zszywkami lub jako zamiennik w trzecim dniu gojenia się rany, aby



ograniczyć ryzyko powstawania blizn

- jako szwy zewnętrzne pod gipsem lub żywicami

#### Sposób użycia

1. Nakleić dwa paski równoległe do brzegów rany.
2. Nakleić trzeci pasek prostopadle do brzegu rany i delikatnie pociągnąć, tak by zbliżyć brzegi rany.
3. Przykleić równoległe do tego opatrunku resztę pasków, tak aby zasklepić całą ranę.
4. Wzmocnić opatrunek przyklejając dwa kolejne paski na wierzchu.