



Ustny aspirator kataru DinoRino

Cena: 12,08 zł



Opis słownikowy

Producent	ACTIA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Aspirator ustny


Opakowanie

- Ustnik 1 szt.
- Wężyk 1 szt.
- Komora górna 1 szt.
- Komora górna 1 szt.
- Filtr 1 szt.
- Dwustronna nakładka antystresowa 2 szt.

Opis

Aspirator **DinoRino** to wyrób medyczny stosowany jest w celu bezpiecznego pozbycia się lekkiego wodnisteo kataru lub w codziennej pielęgnacji noska dziecka. Aspiracja pomaga udrażniać zatkany nos dziecka, zapewniając mu swobodne oddychanie, jedzenie, picie i sen.

Aspirator posiada prostą, ergonomiczną budowę, która sprawia, że korzystanie z aspiratora jest nieskomplikowane i wygodne. Produkt

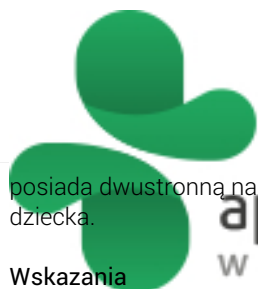

posiada dwustronna nakładkę, którą można umieścić między ustnikiem a wężykiem igielitowym w celu zmniejszenia stresu i niepokoju dziecka.

Wskazania

Lekki katar, codzienna higiena i pielęgnacja nosa dziecka. Odpowiedni do stosowania od pierwszych dni życia.

Sposób użycia



1. Zastosować niewielką ilość soli fizjologicznej w celu zakroplenia noska dziecka.
2. W komorze aspiratora umieścić filtr (5) i połączyć komory (3) i (4). Dopuszcza się używanie aspiratora bez filtra.
3. Wziąć ustnik (1) do ust i odciągnąć wydzielinę raz z jednej dziurki nosa i raz z drugiej. Czynność powtarzać do czasu całkowitego pozbycia się wydzieliny z noska.
4. W przypadku stosowania nakładki-zwierzątka umieścić ją między ustnikiem a wężykiem (6).

Kontrastowe strony nakładki należy stosować u niemowląt 0-4 miesiąca życia, a strony kolorowe u dzieci powyżej 4. miesiąca życia.

Uwagi

Stosując nakładkę należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od oczu dziecka.