



VITAM Test ciążowy płytkowy x 1 szt.



Cena: 9,00 zł

Opis słownikowy

Producent	DIAGNOSIS
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Postać

Test ciążowy

Opakowanie


1 sztuka

Działanie

Vitam jest testem ciążowym domowego użytku. Produkt wykrywa nawet niewielkie ilości hormonu HCG, który stwierdza ciążę lub jej brak. Wiarygodność testu wynosi 99%, odpowiada on wiarygodności testu laboratoryjnego.

Sposób użycia

Przed rozpoczęciem testu należy zebrać próbkę moczu do suchego i czystego pojemnika ze szkła lub plastiku. Wyjąć foliową torebkę z opakowania, rozerwać ją wzdłuż nacięcia, wyjąć pipetkę i płytkę testową. Zanurzyć końcówkę pipetki w pojemniku z próbką moczu i nabrać ją. Pipetkę trzymać pionowo nad okienkiem (Sample S) i umieścić w nim do 4 kropli moczu. Pilnować, by w okienku nie utworzyły się pęcherzyki powietrza. Po 5 minutach odczytać wynik i wyrzucić test.

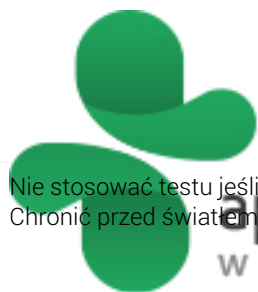

Nie stosować testu jeśli minęła jego data przydatności do spożycia. Przechowywać test w temperaturz od 15 to 30 stopni Celsjusza.
Chronić przed światłem słonecznym. Przed wykonaniem testu próbka powinna przebywać około pół godziny w temperaturze pokojowej.

Dodatkowe informacje znajdują się na ulotce dołączonej do opakowania.