



apteka  
w sieci

# Zakraplacz do oczu SANITY

Cena: 5,21 zł



## Opis słownikowy

Producent	ALBERT POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

### Postać

Zakraplacz

### Opakowanie

1 szt.

### Opis

Precyzyjny i wysokiej klasy zakraplacz, który umożliwia precyzyjne podanie płynu do oczu, ale także uszu czy też nosa. Przyrząd jest higieniczny, pozwala aplikować odpowiednią dawkę płynu.

### Sposób użycia

Przed pierwszym oraz każdym następnym użyciem obie części zakraplacza należy rozdzielić i zanurzyć w całości w gotującej się wodzie na kilka minut. Ścisnąć ssawkę i zanurzyć końcówkę zakraplacza w przygotowanym płynie, a następnie zassać go poprzez zwolnienie nacisku. Aplikować odpowiednią dawkę poprzez ściśnięcie balonika tak, aby ciecz wydawała się kroplami przez otwór na końcu rurki.

### Uwagi

Podczas zabiegu należy zachować bezpieczną odległość wyrobu od oka. Unikać bezpośredniego kontaktu rąk z końcówką zakraplacza.

Rodzaj zastosowanego roztworu/leku zawsze należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Nie stosować środków dezynfekujących. W razie uszkodzenia wyrobu należy go wyrzucić. Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.



Apteka" Pod Różami" MALAYA Sp. z o.o.  
Ogrodowa 40, Racibórz  
+48 32 415 14 67