



apteka  
w sieci

## ZATOXIN RINSE zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok, saszetki 30 szt.

Cena: 12,60 zł



### Opis słownikowy

Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

### Opis produktu

#### Postać

Proszek

#### Opakowanie

Saszetki x 30 szt.

#### Działanie

ZATOXIN RINSE to wyrób medyczny, który stosuje się w stanach zapalnych zatok przynosowych, w nieżytach nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych oraz profilaktycznie w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok. ZATOXIN RINSE pozwala na dokładne oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów, tym samym ograniczając gromadzenie się czynników, mogących powodować infekcje. Unikalna konstrukcja irygatora ZATOXIN RINSE umożliwia płukanie nosa i zatok w łatwy i kontrolowany sposób - bez użycia dodatkowej siły i bez konieczności ściskania butelki.

#### Wskazania

Zestaw do płukania nosa i zatok zaleca się stosować:

- w zapaleniu
- w nieżycie nosa różnego pochodzenia



- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- profilaktycznie, w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok

#### Sposób użycia

Dokładny opis sposobu użycia znajduje się w instrukcji używania dołączonej do opakowania.

#### Dawkowanie

W przypadku zapalenia zatok przynosowych, w niezycie nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok oraz profilaktycznie, w celu zachowania higieny nosa i zatok:

- rozpuścić 1 saszetkę, w 240ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować hipertoniczny roztwór do irygacji.

W razie potrzeby, w przypadku silnych objawów takich jak np. uciążliwe uczucie zatkanego nosa:

- rozpuścić 2 saszetki w 240ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować hipertoniczny roztwór do irygacji.

Do przeprowadzenia płukania u osoby dorosłej należy użyć 120ml roztworu na każdy otwór nosowy. W przypadku przeprowadzenia płukania u dzieci należy użyć 60ml roztworu na każdy otwór nosowy. Pozostałą część niewykorzystanego roztworu należy wylać.

Częstotliwość stosowania zestawu: płukanie nosa przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza, profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

#### Uwagi

Dokładne informacje na temat ostrzeżeń i przeciwwskazań znajdują się w instrukcji dołączonej do zestawu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### Skład

Chlorek sodu, dwuwęglan sodu.