

Zero-Seven Refreshing płyn do soczewek 360ml

Cena: 24,26 zł



Opis słownikowy

Producent	POLYTOUCH CHEMICAL
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Postać

Płyn

Opakowanie

Pojemnik 360ml

Wskazania

Płyn **ZERO-SEVEN Refreshing** przeznaczony jest do czyszczenia miękkich soczewek kontaktowych, w tym również soczewek silikonowo-hydrożelowych.

Sposób użycia

Produkt można stosować na dwa sposoby:

ZABIEG 5-MINUTOWY (POCIERANIE SOCZEWKI)

Na soczewkę nalać min. 3 krople płynu i delikatnie ją pocierać przez ok. 10 sekund. Soczewkę opłukać z każdej strony świeżym płynem. Soczewkę umieścić na ok. 5 minut w pojemniku na soczewki kontaktowe.

ZABIEG 4-GODZINNY (BEZ POCIERANIA)

Soczewkę umieścić w pojemniku na soczewki kontaktowe, zalać świeżym płynem i pozostawić na min. 4 godziny na noc.



Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej 15-30°. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Skład

PHMB 0,0001%, Hypromellose, D-sorbitol, Poloxamer 407, Sodium chloride, Boric acid, Borax, Edetate disodium, sterile purified water.