




Zestaw plastrów hipoalergicznyc**h** WODOODPORN**Y** x 14 szt. PASOCARE

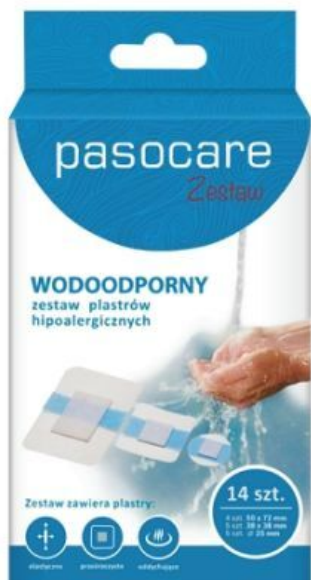

Cena: 5,23 zł

Opis słownikowy

Producent	PASO-TRADING
Rejestracja	Opatrunek

Opis produktu

Postać

Plastry

Opakowanie

14 szt. - rozmiary:

- 4 szt. 50 x 72 mm
- 5 szt. 38 x 38 mm
- 5 szt. Ø 25 mm

Opis

Elastyczne plastry **PASOCARE** chronią drobne rany i skaleczenia przed zamoczeniem. Plastry są przezroczyste, zapewniając dyskrecję podczas noszenia, oddychające, elastyczne, dopasowują się do kształtu ciała i posiadają nieprzywierający opatrunek.

Sposób użycia

1. Ranę oczyścić i osuszyć.



2. Plaster wyjąć bezpośrednio z opakowania.
3. Plaster nakleić na skórę, kierując opatrunek bezpośrednio na ranę.
4. Odkleić folię z wierzchniej strony plastra.
5. Aby usunąć plaster, należy chwycić jego krawędź i pociągnąć wzdłuż skóry.
6. Plaster należy codziennie zmieniać.

Ostrzeżenia

Nie stosować na rany silnie sączące.